


GAMME URITOP® +

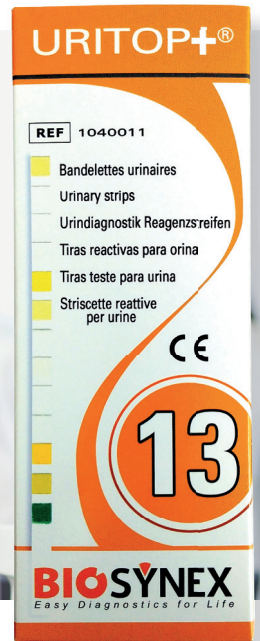

Gamme complète de bandelettes d'orientation clinique pour la détection de 1 à 13 paramètres dans les urines

● Pratique & Rapide

- Flacon de 100 bandelettes avec grille de lecture à l'échelle
- Résultats en 60 secondes *

● Traçabilité & Qualité


- Lecteur URITOP300® et LECTEUR Mini URITOP®
 - Lecture quantitative et qualitative
 - Stockage des résultats
- Contrôles positif et négatif disponibles pour l'accréditation

LA SOLUTION

Paramètres disponibles

	GLUCOSE	PROTEINES	pH	SANG	CORPS CÉTONIQUES	NITRITES	DENSITE	LEUCOCYTES	BILIRUBINE	UROBILINOGENE	ACIDE ASCORBIQUE	MICROALBUMINE	CREATININE
URITOP+ 1 (réf. 1040003)	●												
URITOP+ 2 (réf. 1040004)	●	●											
URITOP+ 3 (réf. 1040005)	●	●	●										
URITOP+ 4 (réf. 1040006)	●	●	●	●									
URITOP+ 5 (réf. 1040007)	●	●	●	●	●								
URITOP+ 7 (réf. 1040008)	●	●	●	●	●	●							
URITOP+ 10 (réf. 1040009)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
URITOP+ 11 (réf. 1040010)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
URITOP+ 13 (réf. 1040011)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


● SEMI-QUANTITATIF
● QUALITATIF

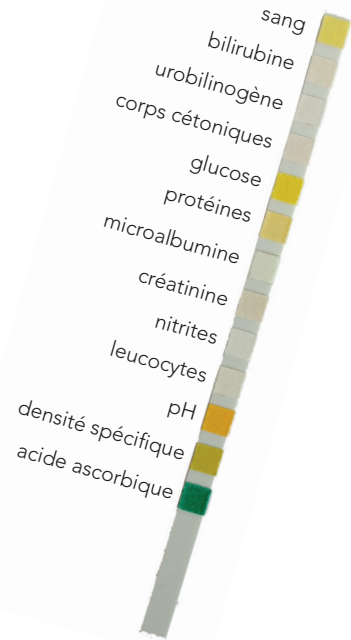

Procédure



1
Immerger la bandelette 2 secondes (maximum) en humectant entièrement toutes les zones réactives. Retirer la bandelette.

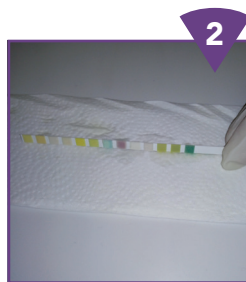

2
Tenir la bandelette horizontalement et mettre en contact sa tranche avec un papier absorbant pour éliminer l'excès d'urine.



3
Lire les résultats à 60 secondes* en comparant les couleurs obtenues sur les zones réactives avec la charte de couleur sur le flacon.

* sauf leucocytes : lire 90 à 120 secondes.

Lecteurs

Compatibilité :

Support :

Mémoire :

Capacité d'analyse :

Clavier étanche :

Connexion ordinateur PC :

Traçabilité :

URITOP300®

URITOP® 5, 7, 10, 11, 13

10 bandelettes

2 000 résultats

300 échantillons / heure

Oui

Oui

Oui



Mini URITOP® (portable)

URITOP® 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11

Individuel

2 000 résultats

40 à 50 échantillons / heure

Oui

Oui

Oui



Références produits CE

- Réf. 1040003 à 1040011 - Gamme URITOP®+
100 bandelettes
- Réf. 6040001 - Contrôles URITOP®+
1 contrôle positif 12 mL
+ 1 contrôle négatif 12 mL
- Réf. 5040001 - Lecteur URITOP®300
- Réf. 5040002 - Lecteur Mini URITOP®

Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou les notices des réactifs et des instruments.

BIO SYNEX
EASY DIAGNOSTICS FOR LIFE FUMOUCHE
DIAGNOSTICS

BIOSYNEX SA

22 Boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN - France
Tel. : +33 3 88 78 80 88 - Fax : +33 3 88 78 76 78

E-mail : client.pro@biosynex.com

www.biosynex.com