

INSTRUCTION D'UTILISATION

Unité de prélèvement à ailettes sécurisée



- 1 Ouvrir l'emballage de l'unité de prélèvement à ailettes



- 2 Retirer le bouchon de l'adaptateur luer




- 3 Visser complètement l'adaptateur luer sur le porte-tube



- 4 Après avoir enlevé le capuchon de l'aiguille, prélever le patient en tenant le dispositif par les ailettes*



- 5 Une fois la collecte de sang réalisée, placer un coton au niveau du point de ponction. Maintenir la base de l'unité de prélèvement à ailettes avec la seconde main et activer la sécurité en poussant doucement le dispositif de sécurité sur l'aiguille de façon à la recouvrir complètement. Le mode de sécurisation est adapté à une mise en sécurité dans la veine du patient

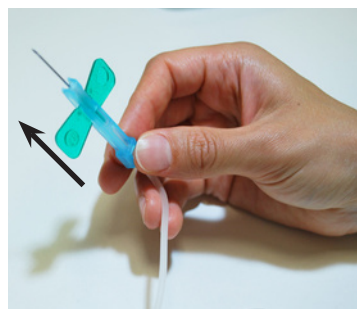

- 6 L'opération de sécurisation est correctement effectuée lorsqu'un « clic » se fait entendre et après vérification visuelle du blocage de l'aiguille

Le port des gants est recommandé (OMS/ARS/INPI)
Circulaire D.G.S./D.M. n°23 du 3 août 1989
Circulaire D.G.S./D.M.98/249 du 20 avril 1998

