

LANCETTES

Choisissez la
sélection du
partenaire
incontournable
des laboratoires



LABELIANS
Groupe CML-ID

LANCETTES SÉCURITAIRES

Dispositif Médical
CE DM



Lancettes automatiques



Lancettes Vitrex Sterilance Press II

100% sécuritaire

- ◆ Plus de risque d'AES, **la lame ou l'aiguille est entièrement protégée avant et après utilisation**
- ◆ Le blocage automatique du dispositif **empêche la réutilisation et élimine les contaminations croisées**
- ◆ Stériles

Confort du patient

- ◆ Incision rapide et peu douloureuse
- ◆ Aiguille à triple biseau de haute qualité qui **limite le traumatisme**
- ◆ **Grand choix de profondeurs de pénétration** pour un prélèvement optimal chez l'adulte et l'enfant

Simplicité d'utilisation

- ◆ Garantissent un **flux sanguin reproductible** à chaque utilisation
Incision calibrée
- ◆ Dispositifs pré-armés
- ◆ Prêtes à l'emploi : utilisables sans stylo auto piqueur, sans assemblage ni réglage
- ◆ Ergonomiques et intuitives
- ◆ Code couleur

- ◆ Diamètre de 18 à 30G
- ◆ Profondeur d'incision de 1,80 à 2,80mm



LSPRESS18G1.8 LSPRESS21G1.8 LSPRESS21G2.2 LSPRESS21G2.8 LSPRESS26G1.8 LSPRESS28G1.8 LSPRESS30G1.8



Version	Couleur	Diamètre (Gauge)	Profondeur incision (mm)	Réf.	Unité de commande
Lame	● Vert	18	1,80	LSPRESS18G1.8	100
Aiguille	● Bleu	21	1,80	LSPRESS21G1.8	100
Aiguille	● Orange	21	2,20	LSPRESS21G2.2	100
Aiguille	● Rose	21	2,80	LSPRESS21G2.8	100
Aiguille	● Jaune	26	1,80	LSPRESS26G1.8	100
Aiguille	● Violet	28	1,80	LSPRESS28G1.8	100
Aiguille	● Turquoise	30	1,80	LSPRESS30G1.8	100

LANCETTES SÉCURITAIRES

Lancettes automatiques

Dispositif Médical
CE DM



Lancettes Vitrex Flex 3

Le produit tout en un pour vos urgences

100% sécuritaire

- ◆ Plus de risque d'AES, **la lame ou l'aiguille est entièrement protégée avant et après utilisation**
- ◆ Le blocage automatique du dispositif **empêche la réutilisation et élimine les contaminations croisées**
- ◆ Stériles

Confort du patient

- ◆ Incision rapide et peu douloureuse
- ◆ Aiguille à triple biseau de haute qualité qui **limite le traumatisme**
- ◆ **Le choix de profondeur de l'incision se fait avant l'utilisation** pour une meilleure adaptation au profil du patient

Simplicité d'utilisation

- ◆ Incision calibrée
- ◆ Dispositifs pré-armés
- ◆ Prêtes à l'emploi

- ◆ 3 profondeurs d'incision différentes pour chaque lancette
- ◆ Profondeur d'incision de 1,30, 1,80 et 2,30mm
- ◆ Diamètre de 26 et 28G



LSFLEX26G3



LSFLEX28G3

1

Tourner le capuchon en fonction de la profondeur d'incision désirée

2

Retirer délicatement le capuchon

3

Appuyer fermement sur la lancette de sécurité réglable au niveau du site choisi pour activer le dispositif

4

Jeter la lancette de sécurité dans un conteneur DASRI approprié

Version	Couleur	Diamètre (Gauge)	Profondeur incision (mm)	Réf.	Unité de commande
Aiguille	● Jaune	26	1,30 - 1,80 - 2,30	LSFLEX26G3	100
Aiguille	● Orange	28	1,30 - 1,80 - 2,30	LSFLEX28G3	100

LANCETTES SÉCURITAIRES

Dispositif Médical
CE DM



Lancettes semi-automatiques



Lancettes Vitrex Sterilance Lite III

Activation par pression pour une ponction simple, confortable et sécurisée

100% sécuritaire

- ◆ Plus de risque d'AES, **la lame ou l'aiguille est entièrement protégée avant et après utilisation**
- ◆ Aiguille de **haute qualité : forme optimisée pour une vitesse accrue**
- ◆ Boîtiers ergonomiques et design pratique
- ◆ Stériles

Confort du patient

- ◆ Flux sanguin fluide
- ◆ Incision rapide et peu douloureuse


Simplicité d'utilisation

- ◆ Actionnement en 2 étapes, **sans chargement**
- ◆ Bouton de déclenchement ergonomique
- ◆ Code couleur

- ◆ Profondeurs d'incision de 1,80 à 2,40mm
- ◆ Diamètre de 18 à 28G



1
Tourner délicatement le capuchon de protection pour le retirer

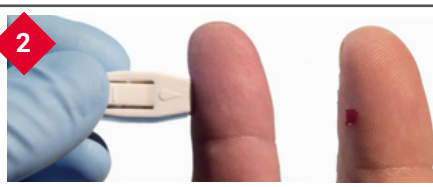


2
Sélectionner le site de ponction et appuyer avec fermeté sur le bouton poussoir pour activer le dispositif



3
Jeter la lancette de sécurité dans un conteneur DASRI approprié

Version	Couleur	Diamètre (Gauge)	Profondeur incision (mm)	Réf.	Unité de commande
Lame	Vert	18	1,80	LSLITE18G18	100
Aiguille	Orange	21	1,80	LSLITE21G18	100
Aiguille	Rose	21	2,40	LSLITE21G24	100
Aiguille	Jaune	26	1,80	LSLITE26G18	100
Aiguille	Bleu	26	2,40	LSLITE26G24	100
Aiguille	Violet	28	1,80	LSLITE28G18	100

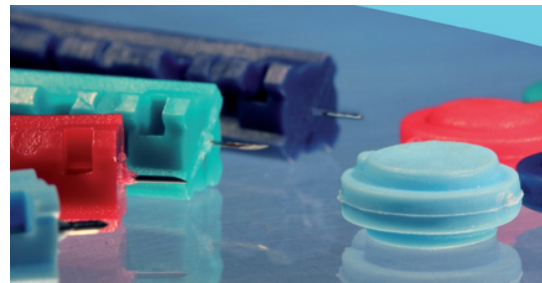

Lancettes Vitrex Soft

Ponction sécurisée

- ◆ Capuchon de sécurité large et long pour assurer l'intégrité avant utilisation et pour **un retrait facile**
- ◆ Stériles

Confort du patient

- ◆ Flux sanguin fluide
- ◆ Traumatisme minime

Simplicité d'utilisation

- ◆ Forme ergonomique
- ◆ Code couleur
- ◆ **Boîtes équipées d'un dispositif de distribution**

- ◆ Diamètre de 23, 28 et 30G
- ◆ Profondeur d'incision de 3,30mm



LSOFT23G

LSOFT28G

LSOFT30G

Version	Couleur	Diamètre (Gauge)	Profondeur incision (mm)	Réf.	Unité de commande
Aiguille	Bleu ciel	23	3,30	LSOFT23G	200
Aiguille	Rouge	28	3,30	LSOFT28G	200
Aiguille	Vert	30	3,30	LSOFT30G	200

Compatibles avec le stylo autopiqueur Vitrex Compact Eject

- ◆ Compatible avec la plupart des marques de lancettes courantes sur le marché
- ◆ 6 profondeurs de piqûre pour une adaptation à divers types de peaux
- ◆ Le bouton d'éjection permet d'enlever la lancette sans la toucher

1

Régler la profondeur souhaitée entre 1 (minimum) et 6 (maximum)

2

Tirer le curseur gris pour activer le mécanisme

3

Appuyer sur le bouton gris pour déclencher le stylo

4

Éjecter la lancette dans un container adapté



Nombre de profondeurs

6

Réf.

STYLANCETECE

Unité de commande

1

LANCETTES PÉDIATRIQUES SÉCURITAIRES

Dispositif Médical
CE DM



Lancettes Vitrex Steriheel Baby Plus

Flux sanguin optimal pour le recueil d'un volume suffisant en toute sécurité

- ◆ L'incision contrôlée de la lame est conçue pour optimiser le flux sanguin
- ◆ Double sécurité avant et après utilisation :
 - Une languette de sécurité protège le bouton d'activation
 - Une fois l'incision effectuée, le bouton reste bloqué automatiquement
- ◆ Sécurité du patient : dispositifs stériles, ne peuvent pas être réutilisés


- ◆ Profondeur d'incision de 0,65 à 1,00mm
- ◆ Longueur d'incision de 1,40 à 3,00mm
- ◆ Code couleur

Profondeur de pénétration minimum et compression minimale des tissus

- ◆ Contrôle de la profondeur de pénétration
- ◆ Dispositifs pré-armés
- ◆ Confort du patient : lame ultra-tranchante et incision rapide pour **un traumatisme minimum et une cicatrisation rapide**



1
Basculer la sécurité

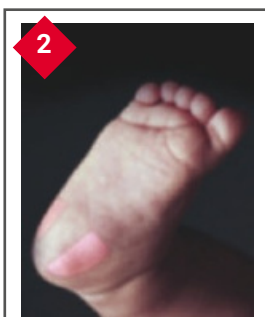

2
Utiliser la position de référence pour le prélèvement de sang au talon des nouveaux nés



3
Lever le pied du bébé pour l'amener dans une position appropriée

Appuyer la fente de la lame contre la surface du talon

Activer la lancette



4
Effectuer le prélèvement à l'aide d'un capillaire



5
Jeter la lancette de sécurité dans un conteneur DASRI approprié

Version	Couleur	Age / Poids indicatif	Longueur d'incision (mm)	Profondeur d'incision (mm)	Réf.	Unité de commande
Lame	Vert	Grands prématurés / Poids : 0 - 1kg	1,40	0,65	LSBABYP04	50
Lame	Orange	Prématurés / Poids : 1 - 2,5kg	1,75	0,85	LSBABYP11	50
Lame	Jaune	Nouveau-nés (0 - 6 mois) / Poids : 2,5 - 9kg	2,50	1,00	LSBABYP05	50
Lame	Rose	Nouveau-nés + (0 - 6 mois) / Poids : 2,5 - 9 kg	2,80	1,14	LSBABYP03	50
Lame	Bleu	Enfants (6 mois - 2 ans) / Poids : > 9kg	3,00	2,00	LSBABYP06	50

TABLEAU DE PRÉCONISATIONS PRÉLÈVEMENT MICROMÉTHODE

Du patient au prélèvement, LABELIANS identifie la solution



Type de patients		Applications liées au prélèvement	Lieu de ponctions	Spécifications Diamètre Profondeur	Produit préconisé/Réf.	
 Adultes et enfants de plus de 1 an	Gériatrie	Prélèvement sanguin	Doigts : • Majeur • Annulaire	Lame 18G 1,8mm		LSPRESS18G1.8
	Oncologie médicamenteuse*					LSLITE18G18
	Veines difficiles*	Glycémie	Doigts : • Majeur • Annulaire	Aiguille 30G 1,8mm		LSPRESS30G1.8
 Enfants de moins de 1 an	Prématuré <2,5kg	Test de Guthrie, prélèvement sanguin	Talon	Lame - 0,85mm		LSBABYP11
		Glycémie	Gros orteil	Aiguille 30G 1,8mm		LSPRESS30G1.8
	Nouveau-nés à terme >2,5kg	Test de Guthrie, prélèvement sanguin Glycémie	Talon	Lame - 1mm		LSBABYP05
				Lame - 2mm		LSBABYP06
	Glycémie	Gros orteil	Aiguille 30G 1,8mm		LSPRESS30G1.8	

* Exemple de lancettes préconisées à titre indicatif seulement.

Pensez-y !

 **KIMA μ TEST®**



 **Capillaires Vitrex**



Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

serviceclient@labelians.fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes, vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos exigences en terme de normes.

www.labelians.fr 



LABELIANS
Groupe CML-ID