

Scannez  
le QR code  
pour découvrir  
la notice



# RECUEIL URINAIRE ECBU

## Comment faire ?

### 1- Recueil

1

Lavez-vous  
soigneusement  
les mains



2

Effectuez  
une toilette  
intime (avec  
une lingette  
nettoyante)



3

Débouchez  
le flacon\* et  
posez le à  
l'envers sur  
une surface  
propre



4

Commencez  
à uriner le 1er jet  
dans les toilettes



5

Revissez  
le bouchon  
à fond



Puis dans le flacon  
sans dépasser  
le niveau "MAX"

*\*Ne jamais toucher l'intérieur  
du flacon ou du bouchon*

DOCURIECBUKRVA6 - 06-2022

## 2- Remplissage



6

Agitez doucement le flacon




7

Soulevez partiellement l'étiquette protectrice (ne pas retirer)



8a

Ordre de prélèvement :  
1- sans additif  
2- avec acide borique

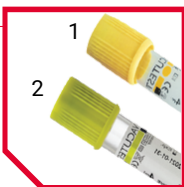

8b

Insérez le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante. Maintenir le tube jusqu'à son remplissage complet



9

Retirez le tube et recollez entièrement l'étiquette protectrice



10

Pour le tube contenant de l'acide borique : retournez-le délicatement 8 à 10 fois



FAIRE PARVENIR VOS ECHANTILLONS  
RAPIDEMENT AU LABORATOIRE

