

RECUEIL D'URINE POUR ECBU

Instructions
d'utilisation
d'un flacon avec
prise sous-vide

Pour le
laboratoire

Pour le patient

- 1  Se laver soigneusement les mains
- 2  Procéder à une toilette intime (avec 1 lingette nettoyante)
- 3  Déboucher le flacon. Poser le bouchon à l'envers sur une surface propre. **Ne pas toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon.**
- 4  a. Commencer à uriner le 1^{er} jet dans les toilettes
b. Puis dans le flacon sans dépasser le niveau "MAX"
- 5  Revisser le bouchon à fond



REMETTEZ-NOUS LE FLACON SOUS 2 HEURES AU LABORATOIRE





LABELIANS
Groupe CML-ID

Agiter doucement le flacon



Insérer le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante


Maintenir le tube en position jusqu'à son remplissage complet



Retirer le tube et recoller entièrement l'étiquette protectrice



Soulever partiellement l'étiquette protectrice (Ne pas l'enlever complètement)

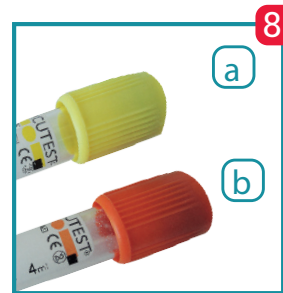

Ordre de prélèvement des tubes :
a. Sans additif
b. Avec acide borique



Pour le tube contenant de l'acide borique : retourner délicatement 8 à 10 fois

