



# RECUEIL URINAIRE ECBU

Instructions d'utilisation  
du flacon avec prise  
sous-vide

Scannez le QR code pour découvrir la notice



## RECUEIL URINAIRE ECBU

Comment faire ?

1 Lavez-vous soigneusement les mains



2 Effectuez une toilette intime (avec une lingette nettoyante)



3 Débouchez le flacon\* et posez le à l'envers sur une surface propre



4 Commencez à uriner le 1er jet dans les toilettes



Puis dans le flacon sans dépasser le niveau "MAX"

5 Revissez le bouchon à fond



*\*Ne jamais toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon*

APPORTEZ VOTRE FLACON SOUS 2 HEURES AU LABORATOIRE



labelians.fr  LABELIANS  
Groupe CML-ID

## Procédure pour le laboratoire



1 Agitez doucement le flacon pour l'homogénéiser



2 Soulevez partiellement l'étiquette protectrice (ne pas retirer)



3 Ordre de prélèvement :  
1- sans additif  
2- avec acide borique



4 Insérez le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante. Maintenir le tube jusqu'à son remplissage complet



5 Retirez le tube et recollez entièrement l'étiquette protectrice



6 Pour le tube contenant de l'acide borique : retournez-le délicatement 8 à 10 fois

