


RECUEIL URINAIRE ECBU

1. Recueil

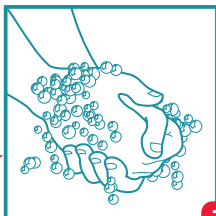

Se laver soigneusement les mains

1

Procéder à une toilette intime (avec 1 lingette nettoyante)



2




Déboucher le flacon
Poser le bouchon à l'envers sur une surface propre
Ne pas toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon


3

a. Commencer à uriner le 1^{er} jet dans les toilettes

b. Puis dans le flacon sans dépasser le niveau "MAX"

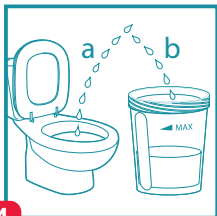

4

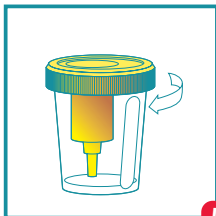

Revisser le bouchon à fond

5




2. Remplissage des tubes

6



Agiter doucement le flacon

7

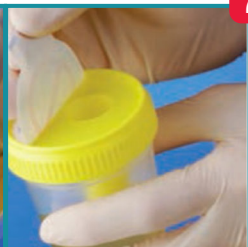

Soulever partiellement l'étiquette protectrice (Ne pas l'enlever complètement)

8a



Insérer le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante. Maintenir le tube en position jusqu'à son remplissage complet.

8b



Ordre de prélèvement des tubes :
a. Sans additif (tube bouchon jaune)
b. Avec acide borique (tube bouchon orange)

9



Retirer le tube et recoller entièrement l'étiquette protectrice.

10



Pour le tube contenant de l'acide borique : retourner délicatement 8 à 10 fois.



FAIRE PARVENIR VOS ÉCHANTILLONS RAPIDEMENT AU LABORATOIRE