

## FICHE TECHNIQUE

## COMBUR7

Bandelette urinaire Roche Combur Test® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 000885

DATE D'EDITION : 31/05/2023 16:20:04



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

COMBUR7

**Désignation**

Bandelette urinaire Roche Combur Test® 7, boîte de 100

**Application**

- Détermination des paramètres chimiques urinaires : diagnostic d'orientation clinique

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

## FICHE TECHNIQUE

## COMBUR7

Bandelette urinaire Roche Combur Test® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 000885

DATE D'EDITION : 31/05/2023 16:20:04

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	160
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1

### Descriptif du produit

<b>Aspect</b>	Solide
<b>Composition</b>	Mélange
<b>pH</b>	Oui
<b>Glucose</b>	Oui
<b>Protéines</b>	Oui
<b>Sang</b>	Oui
<b>Corps cétoniques</b>	Oui
<b>Nitrites</b>	Oui
<b>Leucocytes</b>	Oui
<b>Emballage</b>	Boite de 100
<b>Mode d'emploi</b>	<p>1. Utiliser de l'urine fraîchement émise, non centrifugée. Bien mélanger l'échantillon d'urine          Pour l'analyse, l'échantillon doit être à température ambiante et ne doit pas avoir été recueilli depuis plus de 2 heures</p> <p>2. Sortir une bandelette du tube. Refermer le tube immédiatement à l'aide du bouchon d'origine contenant un dessiccant. Ceci est important pour éviter que les conditions environnantes telles que l'humidité ou les nitrites n'altèrent la couleur des zones réactives          Ceci peut conduire à l'obtention de résultats erronés</p> <p>3. Immerger brièvement (environ 1 seconde) la bandelette dans l'urine en veillant à ce que toutes les zones réactives soient recouvertes</p> <p>4. Égoutter la bandelette en passant la tranche de celle-ci contre le bord du récipient de manière à éliminer l'excès d'urine</p> <p>5. Après 60 secondes (60 à 120 secondes pour la zone réactive des leucocytes), comparer la couleur des zones réactives avec la gamme de couleurs figurant sur l'étiquette. Toujours choisir les valeurs du bloc de couleur se rapprochant le plus de la couleur de la zone réactive</p> <p>En ce qui concerne la 9ème zone réactive (sang), la couleur obtenue doit être comparée avec deux gammes colorimétriques distinctes pour</p>

## FICHE TECHNIQUE

## COMBUR7

Bandelette urinaire Roche Combur Test® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 000885

DATE D'EDITION : 31/05/2023 16:20:04

	les érythrocytes et l'hémoglobine Toute coloration n'apparaissant qu'à la périphérie des zones réactives ou survenant après plus de 2 minutes n'a aucune signification diagnostique
<b>Température de stockage</b>	+2 à +30°C
<b>Conditions de stockage</b>	Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité
<b>Manipulation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Équipement de protection individuel</li><li>- Prévoir une ventilation adéquate aux endroits où la poussière se forme</li><li>- À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité</li><li>- Ne pas utiliser la bandelette après la date de péremption</li><li>- Ne pas utiliser de conservateur de l'urine</li></ul>
<b>Autres caractéristiques</b>	Indications : <ul style="list-style-type: none"><li>- Leucocytes (LEU)</li><li>- Nitrites (NIT)</li><li>- pH</li><li>- Protéines (PRO)</li><li>- Glucose (GLU)</li><li>- Cétones (KET)</li></ul>

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	10

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	ROCHE DIAGNOSTICS
<b>Référence du fabricant</b>	11008552191

## FICHE TECHNIQUE

## COMBUR7

Bandelette urinaire Roche Combur Test® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 000885

DATE D'EDITION : 31/05/2023 16:20:04

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE