

## FICHE TECHNIQUE

## GARP-E

Garrot Prameta rouge Easy avec latex

CODE ARTICLE : 001133

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:18



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

GARP-E

**Désignation**

Garrot Prameta rouge Easy avec latex

**Application**

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

**Réglementation**

Règlement 2017-745 Dispositifs médicaux - Classe I

## FICHE TECHNIQUE

## GARP-E

Garrot Prameta rouge Easy avec latex

CODE ARTICLE : 001133

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:18

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	10
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

### Descriptif du produit

<b>Matière bande</b>	Tissu
<b>Composition bande</b>	- Fils de coton - Polyamide - Latex
<b>Matière boucle</b>	Métallique
<b>Composition boucle</b>	Alliage aluminium
<b>Longueur (en cm)</b>	57,0
<b>Tolérance (en cm)</b>	1,00
<b>Largeur (en cm)</b>	2,3
<b>Epaisseur (en mm)</b>	2,3
<b>Poids (en g)</b>	55,0
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Latex</b>	Oui
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Nettoyage/Désinfection</b>	- Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldéhydes) - Concentration habituelle de la dissolution: 0,5% - Rinçage - Séchage - Fréquence : selon les besoins
<b>Mode d'emploi</b>	1. Placer le garrot à l'endroit de la ponction. Encliqueter le bloc de fixation « Easy » dans la boucle métallique 2. Placer le canal ouvert du bloc de fixation «Easy» en regard de la veine à ponctionner et le tenir d'une main. De l'autre, tirer le bout de la bande jusqu'à l'obtention de la tension souhaitée 3. Ponctionner juste devant le canal ouvert du bloc de fixation «Easy». Grâce à ce canal ouvert, l'injection est possible, même sans réduction de la stase

## FICHE TECHNIQUE

## GARP-E

Garrot Prameta rouge Easy avec latex

CODE ARTICLE : 001133

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:18

**Usage unique**

4. Pour réduire progressivement la stase, appuyer sur le poussoir de la boucle métallique  
5. Pour défaire le garrot, appuyer sur le bloc de fixation « Easy »  
Non

### Traçabilité

**Présence d'un numéro de lot**

Oui

**Présence d'une date de péremption**

Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

PRAMETA

**Référence du fabricant**

904

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE