

## FICHE TECHNIQUE

## SPCU30

Speculum de Cusco en inox largeur 30mm

CODE ARTICLE : 003160

DATE D'EDITION : 21/02/2018 16:40:28



## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Référence</b>	SPCU30
<b>Désignation</b>	Speculum de Cusco en inox largeur 30mm
<b>Application</b>	- Gynécologie
<b>Réglementation</b>	Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I
<b>Conditionnement</b>	<b>Carton (nombre de pièces)</b> 50 <b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b> 1

## FICHE TECHNIQUE

## SPCU30

Speculum de Cusco en inox largeur 30mm

CODE ARTICLE : 003160

DATE D'EDITION : 21/02/2018 16:40:28

### Descriptif du produit

<b>Matière</b>	Inox
<b>Modèle</b>	Cusco
<b>Longueur de la valve (en mm)</b>	80,00
<b>Largeur de la valve (en mm)</b>	30,00
<b>Niveau de stérilité</b>	Non stérile
<b>Usage unique</b>	Non
<b>Autres caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modèle pliant</li> <li>- Nettoyage :           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer les Instruments neufs avant leur première utilisation</li> <li>• Respecter scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage</li> <li>• Nettoyer, désinfecter et stériliser les instruments aussi rapidement que possible après leur utilisation</li> <li>• Ouvrir les instruments articulés avant le nettoyage</li> <li>• Démontez le plus possible les instruments à traiter</li> <li>• Utiliser les accessoires appropriés et conseillés pour le nettoyage</li> <li>• Eviter les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les instruments sans risques de zones d'ombres</li> <li>• Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel</li> <li>• Rincer minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible</li> <li>• Sécher les instruments avec soin après le rinçage</li> <li>• Eliminer les instruments usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques</li> <li>• Pour des raisons d'hygiène, les instruments envoyés en réparation doivent être traités complètement</li> <li>• Procéder à l'entretien des instruments articulés à l'aide d'un lubrifiant à base d'huile de paraffine avant chaque stérilisation (cette règle ne s'applique pas pour des endoscopes souples et leurs accessoires)</li> <li>• Effectuer le contrôle des fonctions une fois l'instrument remonté. Lubrifier les instruments à articulations avant de faire leur contrôle fonctionnel</li> <li>• Ne fermer les instruments à encoche et crémaillères qu'au premier cran avant la stérilisation</li> <li>• Ne jamais oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer des traitements préliminaires, tel que le nettoyage et la désinfection</li> <li>• Manipuler les instruments avec soin et les positionner sans surcharge</li> </ul> </li> </ul>

## FICHE TECHNIQUE

## SPCU30

Speculum de Cusco en inox largeur 30mm

CODE ARTICLE : 003160

DATE D'EDITION : 21/02/2018 16:40:28

- Laisser refroidir l'instrumentation stérilisée avant usage

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	HOLTEX
<b>Référence du fournisseur</b>	IS05630
<b>Pays d'origine</b>	FRANCE