

FICHE TECHNIQUE

CVBS1

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® stérile unitaire

CODE ARTICLE : 003185

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:01:43



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

CVBS1

Désignation

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® stérile unitaire

Application

- Brosse à usage unique pour prélèvement cervico-vaginal
- Les caractéristiques de la Cervex-Brush® la prédestinent au dépistage du cancer du col de l'utérus

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

2000

FICHE TECHNIQUE

CVBS1

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® stérile unitaire

CODE ARTICLE : 003185

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:01:43

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Matière du manche	Plastique
Matière de la brosse	Polyéthylène
Partie sécable	Tête amovible
Longueur totale (en mm)	199,00
Longueur du manche (en mm)	165,00
Emballage	Sachet unitaire
Niveau de stérilité	Stérile par oxyde d'éthylène
Usage unique	Oui
Mode d'emploi	<p>1 – Identifier la lame, mettre en place le spéculum et moucher le col.</p> <p>2 – Introduire la CERVEX BRUSH dans le canal endocervical et exercer une légère pression jusqu'à ce que les fibres épousent tous les contours de col de l'utérus.</p> <p>3 – Maintenir cette pression et tourner la brosse 5 fois dans le sens des aiguilles d'une montre.</p> <p>4 – Etaler lentement le prélèvement sur la lame. Répéter l'opération après avoir retourné la brosse.</p> <p>5 – Fixer immédiatement. La lame est prête à être techniquée et interprétée par le cyto-pathologiste.</p>
Autres caractéristiques	<p>- Dispositif composé :</p> <p>d'une tige mince plastique en polypropylène de 16,5 cm de long</p> <p>d'une brosse amovible, portant des fibres flexibles en polyéthylène de différentes longueurs : Les poils les plus longs sont dans le prolongement direct du manche et pénètrent profondément dans la partie endocervicale. Les plus courts sont répartis de chaque côté des poils longs centraux et suivent les contours du col de l'utérus (surface exocervicale et zone transformationnelle)</p> <p>- Ne pas utiliser quand l'emballage est ouvert ou détérioré.</p> <p>- Ne jamais réutiliser. Ne jamais stériliser soi-même.</p> <p>- Usage strictement réservé au personnel médical.</p>

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

FICHE TECHNIQUE

CVBS1

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® stérile unitaire

CODE ARTICLE : 003185

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:01:43

Durée de vie (en mois) 36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

ROVERS MEDICAL DEVICES BV

Référence du fournisseur

380100331

Pays d'origine

PAYS-BAS