

## FICHE TECHNIQUE

## GARDINO

Garrot tourniquet motif dinosaures sans latex

CODE ARTICLE : 003587

DATE D'EDITION : 25/02/2022 10:30:20



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

GARDINO

### Désignation

Garrot tourniquet motif dinosaures sans latex

### Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

### Réglementation

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe I

## FICHE TECHNIQUE

## GARDINO

Garrot tourniquet motif dinosaures sans latex

CODE ARTICLE : 003587

DATE D'EDITION : 25/02/2022 10:30:20

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	1
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1

### Descriptif du produit

<b>Matière bande</b>	Tissu
<b>Composition bande</b>	- Polyester - Lycra®
<b>Matière boucle</b>	Plastique
<b>Composition boucle</b>	Polycarbonate
<b>Longueur (en cm)</b>	50,0
<b>Largeur (en cm)</b>	2,5
<b>Epaisseur (en mm)</b>	2,0
<b>Poids (en g)</b>	44,0
<b>Couleur</b>	Motif dinosaure
<b>Niveau de stérilité</b>	Non stérile
<b>Latex</b>	Non
<b>Nettoyage/Désinfection</b>	<p>Nettoyage :</p> <p>Aucune procédure de nettoyage mécanique ne peut être utilisée. Laver le produit à 60 °C (maximum) avec des lessives douces pour tissus délicats (lavage à la main).</p> <p>Désinfection :</p> <p>Aucune procédure de désinfection mécanique ne peut être utilisée. Nous recommandons la désinfection avec un désinfectant liquide. Mettre le garrot automatique dans un récipient (non métallique), le couvrir entièrement avec la solution et le laisser dans la solution pendant au moins 5 minutes. Après le temps d'action, rincer abondamment à l'eau fraîche (au moins 3 cycles de rinçage de 1 minute au moins), puis laisser sécher. Ne pas utiliser de désinfectants contenant des agents gonflants chlorés ou des hydrocarbures aromatiques</p>
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermer le garrot</li> <li>2. Comprimer</li> <li>3. Détacher lentement</li> <li>4. Appuyer sur le bouton poussoir de la boucle, puis ouvrir</li> <li>5. Enrouler la bande</li> </ol>

## FICHE TECHNIQUE

## GARDINO

Garrot tourniquet motif dinosaures sans latex

CODE ARTICLE : 003587

DATE D'EDITION : 25/02/2022 10:30:20

### Usage unique

Non

### Autres caractéristiques

Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages externes et le bon fonctionnement du dispositif. En cas de défauts ou de dysfonctionnements, le produit ne doit plus être utilisé.

## Traçabilité

### Présence d'un numéro de lot

Oui

### Présence d'une date de péremption

Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

### Nom du fabricant

KIMETEC GmbH

### Référence du fabricant

500185

### Pays d'origine

ALLEMAGNE