

FICHE TECHNIQUE

ENDOB50A

Brosse endocervicale Rovers® EndoCervex-Brush®

CODE ARTICLE : 004512

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:20:04



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

ENDOB50A

Désignation

Brosse endocervicale Rovers® EndoCervex-Brush®

Application

- Brosse à usage unique recommandée pour tout prélèvement au niveau de l'endocol
- Recommandé pour : les patientes jeunes, les nullipares, les prélèvements difficiles chez les personnes âgées dont la zone de jonction de l'endocol-exocol se rétrécit ou dans le cas de sténose du canal endocervical

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

FICHE TECHNIQUE

ENDO B50A

Brosse endocervicale Rovers® EndoCervex-Brush®

CODE ARTICLE : 004512

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:20:04

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Matière du manche	Polypropylène
Matière de la brosse	Polyéthylène
Partie sécable	Tête amovible
Dimension partie sécable (en mm)	34,00
Longueur totale (en mm)	200,00
Longueur du manche (en mm)	166,00
Emballage	Vrac
Niveau de stérilité	Non stérile
Usage unique	Oui
Mode d'emploi	<p>1 - Introduire l'EndoCervex-Brush® dans le canal endocervical</p> <p>2 - Tourner la brosse 1 fois</p> <p>3 - Traitement du prélèvement :</p> <p>A/ En milieu liquide : Introduire la brosse dans le tube contenant le liquide conservateur et suivre les instructions du fabricant. Faire tomber la tête de la brosse. Fermer le tube et le transmettre au laboratoire.</p> <p>B/ Frottis sur lame : Appliquer le prélèvement sur la lame d'examen microscopique en faisant un mouvement de badigeonnage avec les fibres de la brosse ; d'abord une face puis l'autre. Fixer immédiatement la lame et la transmettre au laboratoire.</p>
Autres caractéristiques	<p>- Dispositif composé :</p> <p>d'une tige mince plastique en polypropylène de 16,6cm de long</p> <p>d'une tête amovible de 3,4cm de long, avec deux segments de 300 fibres fines en polypropylène</p> <p>- Ne pas utiliser quand l'emballage est ouvert ou détérioré.</p> <p>- Ne jamais réutiliser. Ne pas stériliser soi-même.</p> <p>- Usage strictement réservé au personnel médical.</p>

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot Oui

Présence d'une date de péremption Oui

FICHE TECHNIQUE

ENDO B50A

Brosse endocervicale Rovers® EndoCervex-Brush®

CODE ARTICLE : 004512

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:20:04

Durée de vie (en mois) 60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

ROVERS MEDICAL DEVICES BV

Référence du fournisseur

380100703

Pays d'origine

PAYS-BAS