

## FICHE TECHNIQUE

**GARP902**

Garrot Prameta vert modèle 902 sans latex

CODE ARTICLE : 005818

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:30



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

GARP902

**Désignation**

Garrot Prameta vert modèle 902 sans latex

**Application**

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

**Réglementation**

Règlement 2017-745 Dispositifs médicaux - Classe I

## FICHE TECHNIQUE

## GARP902

Garrot Prameta vert modèle 902 sans latex

CODE ARTICLE : 005818

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:30

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 252

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

### Descriptif du produit

<b>Matière bande</b>	Tissu
<b>Composition bande</b>	- Fils de coton - Polyamide - Polyuréthane
<b>Matière boucle</b>	Métallique
<b>Composition boucle</b>	Alliage aluminium
<b>Longueur (en cm)</b>	57,0
<b>Tolérance (en cm)</b>	1,00
<b>Largeur (en cm)</b>	2,3
<b>Epaisseur (en mm)</b>	2,3
<b>Poids (en g)</b>	45,0
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Latex</b>	Non
<b>Autoclavable</b>	Oui
<b>Nettoyage/Désinfection</b>	- Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldéhydes) - Concentration habituelle de la dissolution: 0,5% - Rinçage - Séchage - Fréquence : selon les besoins
<b>Mode d'emploi</b>	1. Placer le garrot. Insérer le poussoir vert dans la boucle métallique du garrot 2. Faire la stase. Tirer la ceinture jusqu'à l'obtention de la pression voulue 3. Supprimer la stase. Appuyer progressivement sur le poussoir métallique pour obtenir une suppression lente de la stase 4. Détacher la boucle. A cet effet, il faut appuyer franchement sur le poussoir vert jusqu'à ce que la boucle s'ouvre
<b>Usage unique</b>	Non
<b>Autres caractéristiques</b>	Le produit bloque le débit sanguin dans les vaisseaux veineux

## FICHE TECHNIQUE

## GARP902

Garrot Prameta vert modèle 902 sans latex

CODE ARTICLE : 005818

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:30

périphériques, ce qui dilate les vaisseaux sanguins obturés dans le but de faciliter la ponction.  
Le produit ne doit être utilisé que par du personnel médical formé.  
Le produit est destiné à une utilisation chez les adultes et les enfants.  
L'utilisation du produit est contre-indiqué chez les patients présentant des sensibilités ou des allergies connues aux matériaux cités.  
Le produit ne doit être utilisé que sur une peau intacte et non modifiée par une pathologie.

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	PRAMETA
Référence du fabricant	902M
Pays d'origine	ALLEMAGNE