

## FICHE TECHNIQUE

## BRGARP902

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2 (ancien modèle)

CODE ARTICLE : 005819

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:05



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

BRGARP902

### Désignation

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2 (ancien modèle)

### Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

### Réglementation

Usage Général de Laboratoire

## FICHE TECHNIQUE

## BRGARP902

Bande de recharge pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2 (ancien modèle)

CODE ARTICLE : 005819

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:05

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

### Descriptif du produit

Matière bande	Tissu
Composition bande	- Fils de coton - Polyamide - Polyuréthane
Longueur (en cm)	57,0
Tolérance (en cm)	1,00
Largeur (en cm)	2,3
Epaisseur (en mm)	2,3
Poids (en g)	23,0
Couleur	Vert
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Autoclavable	Oui
Nettoyage/Désinfection	- Stérilisation par immersion 15 minutes dans une solution contenant de l'alcool (glucoprotamines et aldéhydes) - Concentration habituelle de la dissolution: 0,5% - Rinçage - Séchage - Fréquence : selon les besoins
Mode d'emploi	1. Presser le cran de sécurité et extraire la bande. 2. Glisser la nouvelle bande sous le ressort de la boucle, puis dans la pièce du bout. 3. Contrôler sa bonne fixation
Nombre de poussoirs	1
Usage unique	Non

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
-----------------------------	-----

## FICHE TECHNIQUE

## BRGARP902

Bande de rechange pour garrot Prameta vert modèle 902 pour boucle n°2 (ancien modèle)

CODE ARTICLE : 005819

DATE D'EDITION : 27/06/2023 11:20:05

**Présence d'une date de péremption** Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

PRAMETA

**Référence du fabricant**

902-3

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE