

## FICHE TECHNIQUE

## FP60URIPETIQ

Flacon 60ml en polypropylène pour ECBU avec prise pour tube sous vide stérile avec étiquette

CODE ARTICLE : 007310

DATE D'EDITION : 20/01/2020 11:30:30

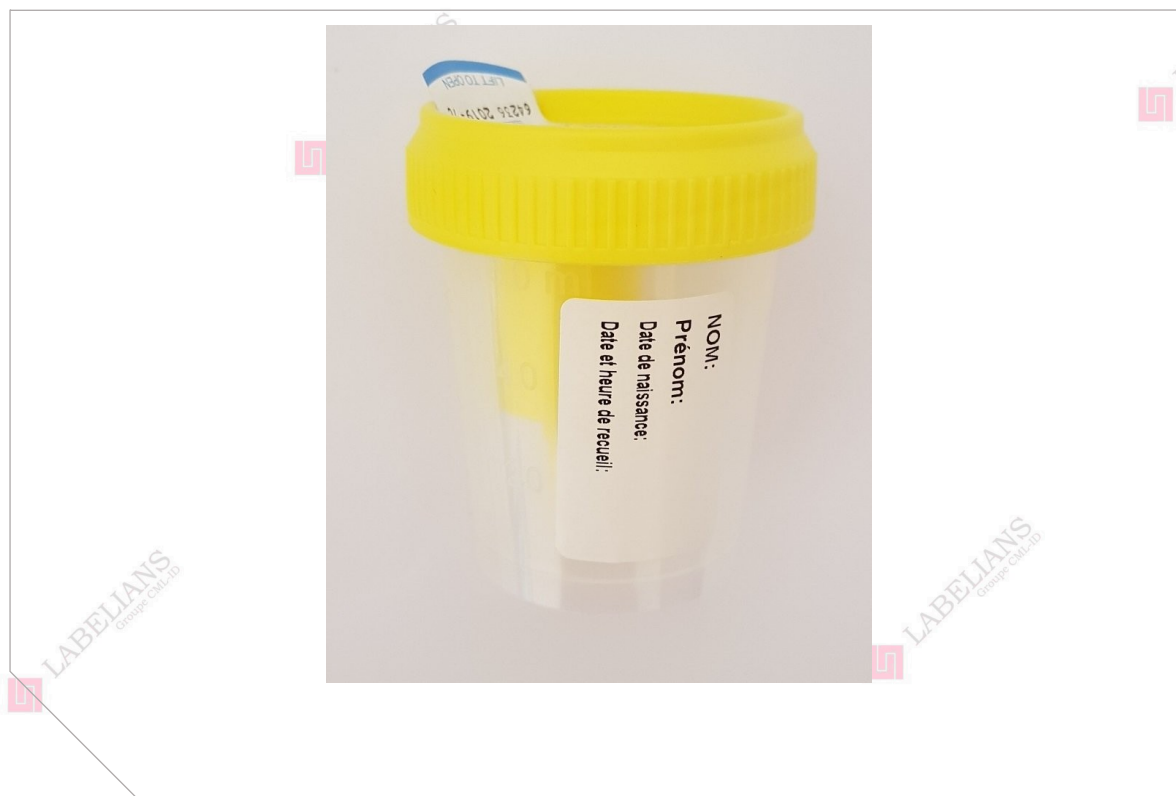


Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

FP60URIPETIQ

### Désignation

Flacon 60ml en polypropylène pour ECBU avec prise pour tube sous vide stérile avec étiquette

### Application

- Recueil sécurisé des urines pour ECBU

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement

## FICHE TECHNIQUE

## FP60URIPETIQ

Flacon 60ml en polypropylène pour ECBU avec prise pour tube sous vide stérile avec étiquette

CODE ARTICLE : 007310

DATE D'EDITION : 20/01/2020 11:30:30

### Conditionnement

européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

**Carton (nombre de pièces)** 500

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 500

### Descriptif du produit

<b>Matière du flacon</b>	Polypropylène
<b>Matière de la cape</b>	Polyéthylène
<b>Prise tube sous vide</b>	Oui
<b>Couleur du flacon</b>	Translucide
<b>Couleur de la cape</b>	Jaune
<b>Flacon + cape assemblés</b>	Oui
<b>Type de cape</b>	A vis
<b>Fermeture</b>	Simple fermeture
<b>Forme du flacon</b>	Tronconique
<b>Volume total (en ml)</b>	60
<b>Volume utile (en ml)</b>	50
<b>Diamètre extérieur corps (en mm)</b>	48,0
<b>Hauteur totale (en mm)</b>	64,0
<b>Graduation</b>	Oui
<b>Plage de graduation</b>	10-20-30-40-50 et 60ml
<b>Etiquette</b>	Oui
<b>Etiquette : dimensions (en mm)</b>	36,5x23,4
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile
<b>Emballage</b>	Vrac
<b>Usage unique</b>	Oui
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Se laver soigneusement les mains</li> <li>2 - Procéder à une toilette intime (avec 1 lingette nettoyante)</li> <li>3 - Déboucher le flacon</li> </ol> Poser le bouchon à l'envers sur une surface propre Ne pas toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon

## FICHE TECHNIQUE

## FP60URIPETIQ

Flacon 60ml en polypropylène pour ECU avec prise pour tube sous vide stérile avec étiquette

CODE ARTICLE : 007310

DATE D'EDITION : 20/01/2020 11:30:30

- 4 - Commencer à uriner le 1er jet dans les toilettes  
Puis dans le flacon sans dépasser le niveau " MAX"
- 5 - Revisser le bouchon à fond  
APPORTER LE FLACON SOUS 2 HEURES AU LABORATOIRE
- 6 - Agiter doucement le flacon
- 7 - Soulever partiellement l'étiquette protectrice (Ne pas l'enlever complètement)
- 8a - Insérer le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante  
Maintenir le tube en position jusqu'à son remplissage complet
- 8b - Ordre de prélèvement des tubes : sans additif puis avec acide borique
- 9 - Retirer le tube et recoller entièrement l'étiquette protectrice
- 10 - Pour le tube contenant de l'acide borique : retourner délicatement 8 à 10 fois

### Autres caractéristiques

- Le flacon de 60 ml avec son dispositif de prélèvement d'urine, peut remplir jusque 4 tubes sous-vide de 10ml
- En cas d'utilisation du flacon pour remplir plus de 2 tubes, il est conseillé de légèrement dévisser le bouchon
- Stérile R : stérile par irradiation, SAL 10-6
- Etiquette papier avec indications : Nom, Prénom, Date de naissance, Date et heure de recueil
- Les températures de stockage préconisées sont entre 5°C et 25°C, à l'abri de la lumière dans un endroit sec.

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

### Nom du fabricant

VACUTEST KIMA SRL

## FICHE TECHNIQUE

## FP60URIPETIQ

Flacon 60ml en polypropylène pour ECBU avec prise pour tube sous vide stérile avec étiquette

CODE ARTICLE : 007310

DATE D'EDITION : 20/01/2020 11:30:30

**Référence du fabricant**

21890LG

**Pays d'origine**

ITALIE