

FICHE TECHNIQUE

1404

Poire porte-pipette pour micropipette capillaire

CODE ARTICLE : 010354

DATE D'EDITION : 24/01/2023 09:50:36



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

1404

Désignation

Poire porte-pipette pour micropipette capillaire

Application

- Manipulation des liquides
- Hématologie

Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -
Classe A

FICHE TECHNIQUE

1404

Poire porte-pipette pour micropipette capillaire

CODE ARTICLE : 010354

DATE D'EDITION : 24/01/2023 09:50:36

Conditionnement

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Autres caractéristiques

Chargement :

- Insérer la pipette dans le détenteur de pipette
- La fin de la pipette doit être visible dans le tube de verre

Remplissage :

- Tenir la pipette horizontalement suffisamment pour remplir par l'attraction capillaire
- Veiller à ne pas couvrir le trou de la pipette

Vidange :

- Couvrir le trou du détenteur de pipette et comprimer le bulbe pour vider la pipette

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

VITREX MEDICAL A/S

Référence du fabricant

140413

FICHE TECHNIQUE

1404

Poire porte-pipette pour micropipette capillaire

CODE ARTICLE : 010354

DATE D'EDITION : 24/01/2023 09:50:36

Pays d'origine

DANEMARK