

FICHE TECHNIQUE

CVBCOMBIA

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® Combi

CODE ARTICLE : 011084

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:02:17



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

CVBCOMBIA

Désignation

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® Combi

Application

- Brosse à usage unique pour prélèvement cervico-vaginal
- Recommandée pour les personnes dont la zone de jonction de l'endocol-exocol se rétrécit ou dans le cas de sténose du canal endocervical

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

FICHE TECHNIQUE

CVBCOMBIA

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® Combi

CODE ARTICLE : 011084

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:02:17

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Matière du manche	Polypropylène
Matière de la brosse	Polyéthylène
Partie sécable	Tête amovible
Longueur totale (en mm)	201,00
Longueur du manche (en mm)	167,00
Emballage	Vrac
Niveau de stérilité	Non stérile
Usage unique	Oui
Mode d'emploi	<p>1 – Introduire les fibres centraux de la brosse dans le canal endocervical et exercer une légère pression jusqu'à ce que la tête de la Cervex-Brush® Combi épousent tous les contours de col de l'utérus.</p> <p>2 – Maintenir cette pression et tourner la brosse 2 fois la Cervex-Brush® Combi dans le sens des aiguilles d'une montre.</p> <p>3 – Traitement du prélèvement :</p> <p>A/ En milieu liquide : Introduire la brosse dans le tube contenant le liquide conservateur et suivre les instructions du fabricant. Faire tomber la tête de la brosse. Fermer le tube et le transmettre au laboratoire.</p> <p>B/ Frottis sur lame : Appliquer le prélèvement sur la lame d'examen microscopique en faisant un mouvement de badigeonnage avec les fibres de la brosse ; d'abord une face puis l'autre. Fixer immédiatement la lame et la transmettre au laboratoire.</p>
Autres caractéristiques	<p>- Dispositif composé :</p> <p>d'une tige mince plastique en polypropylène de 16,7 cm de long d'une brosse amovible portant des fibres flexibles en polyéthylène: un dispositif de prélèvement endocervical (brosse de 2 segments de fibres) dans le prolongement direct du manche, des poils répartis de chaque côté de la brosse centrale suivent les contours du col de l'utérus (surface exocervicale et zone transformationnelle)</p> <p>- Ne pas utiliser quand l'emballage est ouvert ou détérioré.</p> <p>- Ne jamais réutiliser. Ne pas stériliser soi-même.</p> <p>- Usage strictement réservé au personnel médical.</p>

Traçabilité

FICHE TECHNIQUE

CVBCOMBIA

Brosse endocervicale Rovers® Cervex-Brush® Combi

CODE ARTICLE : 011084

DATE D'EDITION : 22/02/2018 14:02:17

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	ROVERS MEDICAL DEVICES BV
Référence du fournisseur	380101010
Pays d'origine	PAYS-BAS