

FICHE TECHNIQUE

FECALSWABR

Milieu FecalSwab™ liquide 2ml + 1 écouvillon floqué embout standard stérile vert

CODE ARTICLE : 013715

DATE D'EDITION : 13/12/2018 10:11:30



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

FECALSWABR

Désignation

Milieu FecalSwab™ liquide 2ml + 1 écouvillon floqué embout standard stérile vert

Application

- Prélèvements au niveau du rectum et échantillons fécaux destinés à la culture des entérobactéries
- Conservation et transport des entérobactéries

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la

FICHE TECHNIQUE

FECALSWABR

Milieu FecalSwab™ liquide 2ml + 1 écouvillon floqué embout standard stérile vert

CODE ARTICLE : 013715

DATE D'EDITION : 13/12/2018 10:11:30

Conditionnement

2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

Carton (nombre de pièces) 500

Minimum de vente (nombre de pièces) 50

Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Floqué
Tige	Simple
Matière de la tige	Plastique
Partie sécable	80mm
Matière de l'embout	Nylon
Type de l'embout	Standard / Regular
Site de prélèvement	Rectum
Longueur totale de l'écouvillon (en mm)	151,0
Type de milieu	LBM
Nom du milieu	Cary-Blair
Etat du milieu	Liquide
Volume de milieu (en ml)	2,0
Composition du milieu	- Chlorure de sodium - Chlorure de calcium - Phosphate de sodium mono-acide - Thioglycolate de sodium - Agar bactériologique - Eau distillée - pH : 7.2 ± 0.3
Couleur du bouchon	Vert
Microorganismes recherchés (culture)	Entérobactéries
Durée maximum de transport	48h
Niveau de stérilité	Stérile
Emballage	Sachet pelable unitaire
Sous-conditionnement	Sachet de 50

FICHE TECHNIQUE

FECALSWABR

Milieu FecalSwab™ liquide 2ml + 1 écouvillon floqué embout standard stérile vert

CODE ARTICLE : 013715

DATE D'EDITION : 13/12/2018 10:11:30

Mode d'emploi

- Ouvrir le blister. Extraire le tube et l'écouvillon.
- Effectuer le recueil à l'aide de l'écouvillon, par prélèvement rectal ou sur l'échantillon de selles
- Desserrer le bouchon d'une manière aseptique
- Introduire l'écouvillon avec l'échantillon prélevé dans le tube
- Casser l'écouvillon au point de rupture marqué par une ligne colorée
- Revisser le bouchon du tube
- Identifier le tube
- Acheminer au plus tôt l'échantillon prélevé au laboratoire
- Vortexer le tube pendant 5 secondes préalablement avant la réalisation de tests

Autres caractéristiques

- Stockage (avant prélèvement) : de 5 à 25°C dans un endroit sec
- Conservation (après prélèvement) :
Jusqu'à 48h à température ambiante
Entre 48h à 72h dans le réfrigérateur à 4°C
Ne pas congeler
- Tube résistant à 95kPa

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	15

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	COPAN ITALIA S.p.A.
Référence du fournisseur	470CE
Pays d'origine	ITALIE

FICHE TECHNIQUE

FECALSWABR

Milieu FecalSwab™ liquide 2ml + 1 écouvillon floqué embout standard stérile vert

CODE ARTICLE : 013715

DATE D'EDITION : 13/12/2018 10:11:30