

## FICHE TECHNIQUE

## URITOP7

Bandelette urinaire URITOP® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 015114

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:15:51

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

URITOP7

### Désignation

Bandelette urinaire URITOP® 7, boîte de 100

### Application

- Diagnostic in vitro- URITOP 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 10 : compatibles avec le lecteur URITOP PORTABLE- URITOP 5, 7 et 10 : compatibles avec le lecteur URITOP 300

### Réglementation

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

## Descriptif du produit

<b>Aspect</b>	Solide avec petites surfaces multicolores de réactifs fixés à la bandelette plastique
<b>Odeur</b>	Inodore
<b>Composition</b>	Sels tamponnés, enzymes, indicateur de pH, SUR les bandelettes en plastique
<b>pH</b>	Oui
<b>Glucose</b>	Oui
<b>Protéines</b>	Oui
<b>Sang</b>	Oui
<b>Nitrites</b>	Oui
<b>Densité</b>	Oui
<b>Leucocytes</b>	Oui
<b>Emballage</b>	Boîte de 100
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Immerger la bandelette 2 secondes (au maximum) dans l'urine en humectant entièrement toutes les zones réactives</li> <li>2. Retirer la bandelette en glissant sa face arrière contre les parois du récipient pour éliminer l'excès d'urine. Lors de cette étape, prendre</li> </ol>

## FICHE TECHNIQUE

## URITOP7

Bandelette urinaire URITOP® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 015114

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:15:51

<b>Température de stockage</b>	+2 à +30°C
<b>Conditions de stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conserver le flacon fermé</li> <li>- Ne pas conserver les bandelettes au réfrigérateur ni les congeler</li> <li>- Conserver à l'abri de l'humidité et du soleil</li> <li>- Après ouverture du flacon, les bandelettes doivent être utilisées dans un délai de 6 mois</li> </ul>
<b>Manipulation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir le flacon juste avant la réalisation du test</li> <li>- Fermer le flacon hermétiquement immédiatement après chaque utilisation</li> <li>- Conserver le flacon hermétiquement fermé entre deux utilisations</li> <li>- Pour le diagnostic in vitro et usage professionnel uniquement.</li> <li>- Ne pas toucher les zones réactives situées sur les bandelettes</li> <li>- Se munir d'une blouse, de gants et de protection oculaire lors de la réalisation du test</li> <li>- Éviter tout contact avec la peau et les yeux</li> </ul>

soin de ne pas mettre en contact les zones réactives de la bandelette avec les parois du récipient

3. Tenir la bandelette en position horizontale et mettre en contact la tranche de la bandelette avec un papier absorbant (par exemple une serviette en papier) afin de supprimer l'excédent d'urine pour éviter de mélanger les matières chimiques des zones réactives adjacentes. Une présence excessive d'urine sur la bandelette peut créer des interactions chimiques entre deux zones réactives voisines et être à l'origine de résultats erronés

4. Pour la lecture visuelle : La lecture des résultats se fait à 60 secondes (sauf les leucocytes à 90 - 120 secondes) : comparer les couleurs des zones réactives obtenues par rapport à la charte de couleur fixée sur le flacon dans des bonnes conditions d'éclairage. Lors de la lecture, conserver la bandelette horizontale afin d'empêcher un mélange des différents réactifs chimiques qui peut avoir lieu en cas d'excès d'urine

Pour la lecture avec le Lecteur URITOP300 ou le MINI URITOP: Suivre attentivement les indications du manuel du lecteur. Le lecteur lira automatiquement chaque zone réactive au temps donné

## Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	18

## FICHE TECHNIQUE

## URITOP7

Bandelette urinaire URITOP® 7, boîte de 100

CODE ARTICLE : 015114

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:15:51

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

BIOSYNEX

**Référence du fabricant**

1040008

**Pays d'origine**

FRANCE