

## FICHE TECHNIQUE

## ANIOSPRAYS291L

Désinfectant Aniospray Surf 29, spray de 1L

CODE ARTICLE : 016014

DATE D'EDITION : 24/09/2021 14:20:18



BIOCIDE

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

ANIOSPRAYS291L

### Désignation

Désinfectant Aniospray Surf 29, spray de 1L

### Application

- Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés

### Réglementation

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

## FICHE TECHNIQUE

## ANIOSPRAYS291L

Désinfectant Aniospray Surf 29, spray de 1L

CODE ARTICLE : 016014

DATE D'EDITION : 24/09/2021 14:20:18

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	12
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	12

### Descriptif du produit

<b>Capacité (en L)</b>	1
<b>Type de contenant</b>	Pulvérisateur
<b>Composition</b>	Ethanol (226mg/g), digluconate de chlorhexidine (0,64mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium (0,53mg/g), excipients
<b>Propriétés microbiologiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bactéricide en 5 minutes (EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281)</li> <li>- Levuricide en 15 minutes (EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281)</li> <li>- Fongicide en 30 minutes (EN 1275, EN 13624, EN 13697)</li> <li>- Virucide en 1 minute sur Vaccinia virus (EN 14476), PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV</li> </ul>
<b>Consignes</b>	<p>Dangereux, respecter les précautions d'emploi.          Utiliser les biocides avec précaution.          Avant toute utilisation, lire l'étiquette ainsi que les informations concernant le produit.</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>Nettoyer préalablement la pièce à l'aide d'un détergent désinfectant.          Pulvériser sur les surfaces verticales puis le mobilier, du fond de la pièce jusqu'à la sortie à raison de 80ml / m<sup>2</sup>.          Laisser agir, pièce fermée, pendant 5 minutes minimum.          Aérer si possible avant réutilisation.</p>

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	24

## FICHE TECHNIQUE

## ANIOSPRAYS291L

Désinfectant Aniospray Surf 29, spray de 1L

CODE ARTICLE : 016014

DATE D'EDITION : 24/09/2021 14:20:18

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

**Nom du fabricant**

D.M.D.

**Référence du fabricant**

2421073

**Pays d'origine**

FRANCE