

FICHE TECHNIQUE

VK108SAS

Tube sous vide Vacutest® en PET 8ml/10ml sec avec gel stérile

CODE ARTICLE : 016579

DATE D'EDITION : 10/07/2018 14:02:57

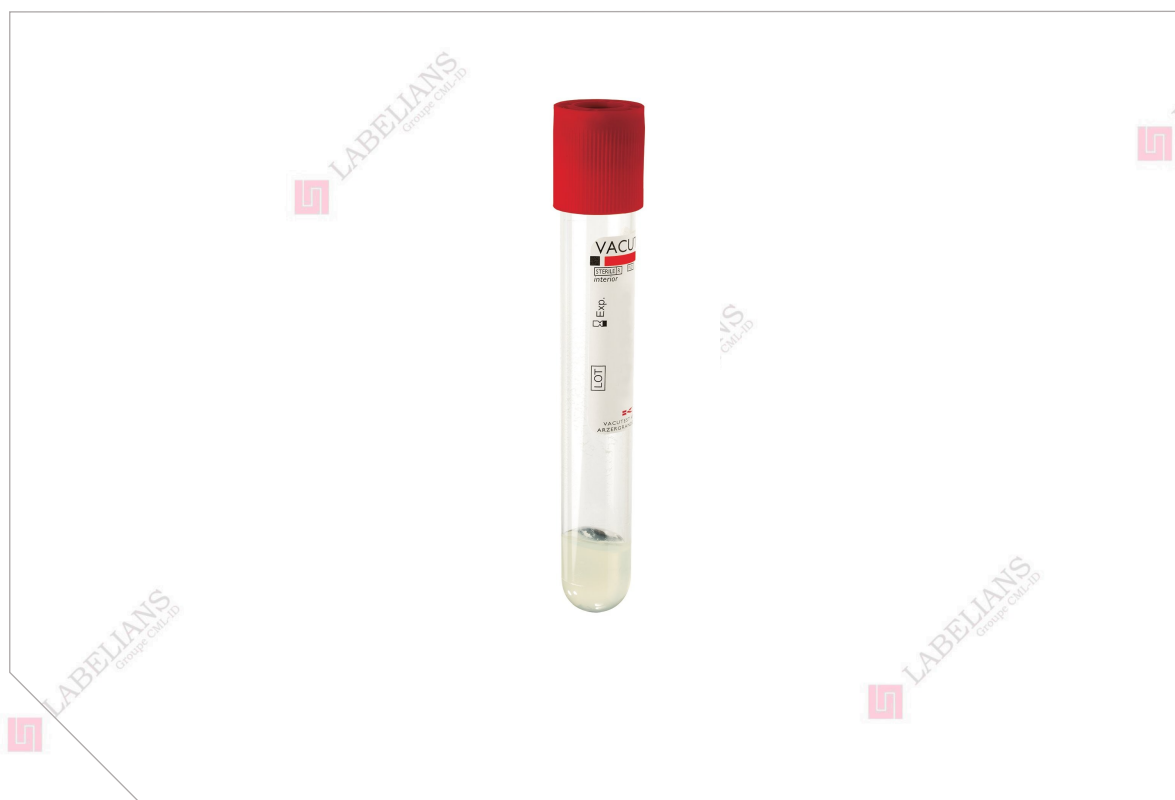


Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

VK108SAS

Désignation

Tube sous vide Vacutest® en PET 8ml/10ml sec avec gel stérile

Application

- Prélèvement d'échantillons sanguins

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 98/79/CE du Parlement européen du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

FICHE TECHNIQUE

VK108SAS

Tube sous vide Vacutest® en PET 8ml/10ml sec avec gel stérile

CODE ARTICLE : 016579

DATE D'EDITION : 10/07/2018 14:02:57

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 500

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Application majeure	Biochimie
Nature de l'additif	Activateur de coagulation et gel
Présentation de l'additif	Gel
Matière du tube	Polytéréphtalate d'éthylène
Paroi du tube	Standard
Diamètre du tube (en mm)	16
Hauteur du tube (en mm)	100
Volume du tube (en ml)	10
Volume de vide (en ml)	8
Type de bouchon	Coiffant
Couleur du bouchon	Rouge
Descriptif du bouchon	- Matière : surface large de perçage en butyle, cape coiffante en polyéthylène - Hauteur : 2 cm avec rainures - Code couleur ISO 6710:1995
Etiquetage	Papier auto-adhésif
Indicateur du niveau de remplissage	Oui
Nombre d'inversions	6 à 8
Délai minimum entre prélèvement et centrifugation (en min)	30
Délai maximum entre prélèvement et centrifugation (en h)	Aucun
Vitesse de centrifugation (en g)	1300-2000
Température de centrifugation (en °C)	20-25
Durée de centrifugation (en min)	10
Délai de conservation après centrifugation, à 2-4°C	7 jours
Délai de conservation après	≤ 48 heures

FICHE TECHNIQUE

VK108SAS

Tube sous vide Vacutest® en PET 8ml/10ml sec avec gel stérile

CODE ARTICLE : 016579

DATE D'EDITION : 10/07/2018 14:02:57

centrifugation, jusqu'à 24°C	
Délai de conservation après centrifugation, ≤ -20°C	> 7 jours
Niveau de stérilité	Stérile - Irradiation
A usage unique	Oui
Stockage et conservation	<ul style="list-style-type: none"> - Le tube conservé sur de longues durées doit être stocké dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C - Il doit être maintenu en position verticale, bouchon en haut, comme signalé sur chaque carton
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme au marquage CE (DIV) - Conforme aux normes ISO 6710 et EN 14820 relatives aux tubes à prélèvement - Conforme au CLSI - Stérile par irradiation conformément à la norme EN ISO 11137-1 et EN ISO 11737-2

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	18

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant ou du fournisseur	VACUTEST KIMA SRL
Référence du fournisseur	10060
Pays d'origine	ITALIE