

## FICHE TECHNIQUE

## CBRUSHPLUS

Brosse endocervicale CerviBrush+ Profile™ LBC sécable

CODE ARTICLE : 016793

DATE D'EDITION : 30/06/2021 16:50:26



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

CBRUSHPLUS

### Désignation

Brosse endocervicale CerviBrush+ Profile™ LBC sécable

### Application

- Prélèvement endocervical

### Réglementation

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe I

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 100

## FICHE TECHNIQUE

## CBRUSHPLUS

Brosse endocervicale CerviBrush+ Profile™ LBC sécable

CODE ARTICLE : 016793

DATE D'EDITION : 30/06/2021 16:50:26

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 100

### Descriptif du produit

|   |   |
|---|---|
| <b>Matière du manche</b>                  | Plastique   |
| <b>Matière de la brosse</b>               | Plastique   |
| <b>Embout protégé</b>                     | Non   |
| <b>Partie sécable</b>                     | Manche sécable  |
| <b>Dimension partie sécable (en mm)</b>   | 37,00   |
| <b>Longueur totale (en mm)</b>            | 187,00  |
| <b>Longueur du manche (en mm)</b>         | 169,00  |
| <b>Diamètre du manche (en mm)</b>         | 5,00  |
| <b>Longueur de la brosse (en mm)</b>      | 18,00   |
| <b>Diamètre de la brosse haut (en mm)</b> | 4,00  |
| <b>Emballage</b>                          | Vrac  |
| <b>Niveau de stérilité</b>                | Non stérile   |
| <b>Usage unique</b>                       | Oui   |
| <b>Mode d'emploi</b>                      | <p>1- Insérer doucement la brosse Profile+ LBC dans l'endocol et la tourner d'un demi à un tour</p> <p>2- Cytologie en milieu liquide</p> <p>Enlever la brosse Profile+ LBC, casser la tête de la brosse et l'insérer dans le tube d'échantillon cytologique</p> <p>3- Méthode conventionnelle</p> <p>Un frottis peut également être préparé de manière conventionnelle en déroulant la tête de la brosse sur une lame de verre propre et étiquetée. Si nécessaire, préparer plusieurs lames avant de jeter la brosse</p> |
| <b>Autres caractéristiques</b>            | <p>- NE PAS utiliser pour le prélèvement de frottis de l'endomètre</p> <p>- NE PAS utiliser en cas de grossesse suspectée ou confirmée</p>  |

### Traçabilité

|  |     |
|--|-----|
| <b>Présence d'un numéro de lot</b>       | Oui |
| <b>Présence d'une date de péremption</b> | Oui |

## FICHE TECHNIQUE

## CBRUSHPLUS

Brosse endocervicale CerviBrush+ Profile™ LBC sécable

CODE ARTICLE : 016793

DATE D'EDITION : 30/06/2021 16:50:26

**Durée de vie (en mois)** 60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Nom du fabricant</b>       | CELLPATH PLC |
| <b>Référence du fabricant</b> | NCA-0422-02A |
| <b>Pays d'origine</b>         | ROYAUME UNI  |