

## FICHE TECHNIQUE

## NERYTHRO

Kit Ery-TIC® plus pour la numération des érythrocytes, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

CODE ARTICLE : 018008

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:16:14



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

NERYTHRO

**Désignation**

Kit Ery-TIC® plus pour la numération des érythrocytes, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

**Application**

- Numération exacte des érythrocytes

**Réglementation**

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -

## FICHE TECHNIQUE

## NERYTHRO

Kit Ery-TIC® plus pour la numération des érythrocytes, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

CODE ARTICLE : 018008

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:16:14

### Conditionnement

Classe A

**Carton (nombre de pièces)** 1

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Composition</b>	- 100 pièces Ery-TIC® - 100 pièces pipettes capillaires "end to end" de 5µl - 100 pièces pipettes capillaires de remplissage
<b>Test</b>	Ery-TIC®
<b>Erythrocytes</b>	Oui
<b>Emballage</b>	Kit
<b>Mode d'emploi</b>	1- Remplir les capillaires "end to end" avec du sang 2- Placer les capillaires dans le récipient 3- Fermer et agiter 4- Agiter avant de remplir la chambre 5- Remplir les capillaires de remplissage par capillarité 6- Remplir la chambre de comptage et passer à la numération
<b>Température de stockage</b>	Température ambiante : +15 et +25°C jusqu'à leur date de fin de validité
<b>Conditions de stockage</b>	Conserver dans leur emballage en position debout et à l'obscurité
<b>Manipulation</b>	- Respecter les consignes de sécurité en matière de manipulation de réactifs de laboratoire et human liquide - La procédure doit être exécutée par du personnel formé et qualifié - Pendant le travail porter des vêtements de protection et gants de protection - Utiliser un détendeur de capillaires pour les capillaires de volume

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	12

## FICHE TECHNIQUE

## NERYTHRO

Kit Ery-TIC® plus pour la numération des érythrocytes, 100 tests unitaires avec pipettes capillaires

CODE ARTICLE : 018008

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:16:14

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

---

**Nom du fabricant**

BIOANALYTIC GMBH

**Référence du fabricant**

004012-0007

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE