

FICHE TECHNIQUE

MEDITEST9

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 9, boîte de 100

CODE ARTICLE : 018010

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:14:41



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MEDITEST9

Désignation

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 9, boîte de 100

Application

- Détermination rapide en diagnostic urinaire- Exploitée visuellement

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)

30

FICHE TECHNIQUE

MEDITEST9

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 9, boîte de 100

CODE ARTICLE : 018010

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:14:41

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Aspect	Solide coloré
Odeur	Inodore
Composition	- Cellulose : 1-10% - Mélange : 0,1-1% - PVC foli : 95-100%
pH	Oui
Glucose	Oui
Protéines	Oui
Sang	Oui
Corps cétoniques	Oui
Nitrites	Oui
Bilirubine	Oui
Urobilinogène	Oui
Acide ascorbique	Oui
Emballage	Boîte de 100
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparer une montre munie d'une trotteuse. Noter la date et l'heure 2. Ouvrir le tube. Prendre une seule bandelette. Ne pas toucher la zone réactive / zone-test 3. Refermer le tube immédiatement 4. Plonger la bandelette dans l'urine durant 1 seconde environ. La zone réactive doit être immergée 5. Après avoir retiré la bandelette de l'échantillon d'urine, en éponger brièvement la bordure sur du papier. Garder la bandelette en main 6. Attendre 30 secondes 7. Commencer l'interprétation : sur l'étiquette du tube figure une échelle de couleurs pour la zone réactive Attribuer à la zone réactive une valeur de couleur. Si aucune correspondance ne peut être trouvée, choisir la valeur de couleur la plus proche de la zone réactive 8. Noter le résultat et le présenter à votre médecin lors de la prochaine visite 9. Acheter l'interprétation au plus tard 1 minute après avoir immergé la bandelette

FICHE TECHNIQUE

MEDITEST9

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 9, boîte de 100

CODE ARTICLE : 018010

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:14:41

	Respecter toujours ce délai. Au-delà de ce délai, l'intensité des couleurs de la zone réactive peut changer
Température de stockage	+4 à +30°C
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none">- Garder l'emballage original hermétiquement fermé- Protéger les bandelettes de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver le tube au frais (pas au réfrigérateur) et au sec
Manipulation	<ul style="list-style-type: none">- Effectuer le test immédiatement après la collecte de l'échantillon d'urine- Ne sortir du tube que le nombre nécessaire de bandelettes- Ne toucher pas les zones réactives- Refermer le tube immédiatement après avoir sorti les bandelettes. Ne retirer pas le dessiccatif du bouchon et n'endommager pas ce bouchon

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	MACHEREY NAGEL
Référence du fabricant	93023
Pays d'origine	ALLEMAGNE