

## FICHE TECHNIQUE

## MEDITEST3A

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 3A, boîte de 100

CODE ARTICLE : 018012

DATE D'EDITION : 25/01/2023 11:30:02



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

MEDITEST3A

**Désignation**

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 3A, boîte de 100

**Application**

- Détermination rapide en diagnostic urinaire- Exploitée visuellement- Acide ascorbique, Glucose, pH, Protéines

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

## FICHE TECHNIQUE

## MEDITEST3A

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 3A, boîte de 100

CODE ARTICLE : 018012

DATE D'EDITION : 25/01/2023 11:30:02

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	30
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1

### Descriptif du produit

<b>Aspect</b>	Solide coloré
<b>Odeur</b>	Inodore
<b>Composition</b>	- Cellulose : 1-10% - Mélange : 0,1-1% - PVC foli : 95-100%
<b>pH</b>	Oui
<b>Glucose</b>	Oui
<b>Protéines</b>	Oui
<b>Acide ascorbique</b>	Oui
<b>Emballage</b>	Boîte de 100
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Préparer une montre munie d'une trotteuse. Noter la date et l'heure</li> <li>2. Ouvrir le tube. Prendre une seule bandelette. Ne pas toucher la zone réactive / zone-test</li> <li>3. Refermer le tube immédiatement</li> <li>4. Plonger la bandelette dans l'urine durant 1 seconde environ. La zone réactive doit être immergée</li> <li>5. Après avoir retiré la bandelette de l'échantillon d'urine, en éponger brièvement la bordure sur du papier. Garder la bandelette en main</li> <li>6. Attendre 30 secondes</li> <li>7. Commencer l'interprétation : sur l'étiquette du tube figure une échelle de couleurs pour la zone réactive Attribuer à la zone réactive une valeur de couleur. Si aucune correspondance ne peut être trouvée, choisir la valeur de couleur la plus proche de la zone réactive</li> <li>8. Noter le résultat et le présenter à votre médecin lors de la prochaine visite</li> <li>9. Achever l'interprétation au plus tard 1 minute après avoir immergé la bandelette</li> </ol> <p>Respecter toujours ce délai. Au-delà de ce délai, l'intensité des couleurs de la zone réactive peut changer</p>
<b>Température de stockage</b>	+4 à +30°C

## FICHE TECHNIQUE

## MEDITEST3A

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 3A, boîte de 100

CODE ARTICLE : 018012

DATE D'EDITION : 25/01/2023 11:30:02

### Conditions de stockage

- Garder l'emballage original hermétiquement fermé
- Protéger les bandelettes de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver le tube au frais (pas au réfrigérateur) et au sec

### Manipulation

- Effectuer le test immédiatement après la collecte de l'échantillon d'urine
- Ne sortir du tube que le nombre nécessaire de bandelettes
- Ne toucher pas les zones réactives
- Refermer le tube immédiatement après avoir sorti les bandelettes. Ne retirer pas le dessiccant du bouchon et n'endommager pas ce bouchon

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Oui

Durée de vie (en mois)

24

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

MACHEREY NAGEL

**Référence du fabricant**

93030

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE