

## FICHE TECHNIQUE

## MEDITESTG100

Bandelette urinaire Medi-Test Glucose, boîte de 100

CODE ARTICLE : 019881

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:15:28



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

MEDITESTG100

**Désignation**

Bandelette urinaire Medi-Test Glucose, boîte de 100

**Application**

- Détermination rapide en diagnostic urinaire- Exploitée visuellement

**Réglementation**

Usage Général de Laboratoire

**Conditionnement**

Carton (nombre de pièces) 0

## FICHE TECHNIQUE

## MEDITESTG100

Bandelette urinaire Medi-Test Glucose, boîte de 100

CODE ARTICLE : 019881

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:15:28

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 1

### Descriptif du produit

<b>Aspect</b>	Solide coloré
<b>Odeur</b>	Inodore
<b>Composition</b>	- Cellulose : 1-10% - Mélange : 0,1-1% - PVC foli : 95-100%
<b>Glucose</b>	Oui
<b>Emballage</b>	Boite de 100
<b>Mode d'emploi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Préparer une montre munie d'une trotteuse. Noter la date et l'heure</li> <li>2. Ouvrir le tube. Prendre une seule bandelette. Ne pas toucher la zone réactive / zone-test</li> <li>3. Refermer le tube immédiatement</li> <li>4. Plonger la bandelette dans l'urine durant 1 seconde environ. La zone réactive doit être immergée</li> <li>5. Après avoir retiré la bandelette de l'échantillon d'urine, en éponger brièvement la bordure sur du papier. Garder la bandelette en main</li> <li>6. Attendre 30 secondes</li> <li>7. Commencer l'interprétation : sur l'étiquette du tube figure une échelle de couleurs pour la zone réactive</li> <li>Attribuer à la zone réactive une valeur de couleur. Si aucune correspondance ne peut être trouvée, choisir la valeur de couleur la plus proche de la zone réactive</li> <li>8. Noter le résultat et le présenter à votre médecin lors de la prochaine visite</li> <li>9. Achever l'interprétation au plus tard 1 minute après avoir immergé la bandelette</li> </ol> <p>Respecter toujours ce délai. Au-delà de ce délai, l'intensité des couleurs de la zone réactive peut changer</p>
<b>Température de stockage</b>	+4 à +30°C
<b>Conditions de stockage</b>	- Garder l'emballage original hermétiquement fermé - Protéger les bandelettes de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver le tube au frais (pas au réfrigérateur) et au sec
<b>Manipulation</b>	- Effectuer le test immédiatement après la collecte de l'échantillon d'urine - Ne sortir du tube que le nombre nécessaire de bandelettes - Ne toucher pas les zones réactives

## FICHE TECHNIQUE

## MEDITESTG100

Bandelette urinaire Medi-Test Glucose, boîte de 100

CODE ARTICLE : 019881

DATE D'EDITION : 25/05/2022 12:15:28

- Refermer le tube immédiatement après avoir sorti les bandelettes.  
Ne retirer pas le dessiccatif du bouchon et n'endommager pas ce bouchon

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	24

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	MACHEREY NAGEL
<b>Référence du fabricant</b>	93024
<b>Pays d'origine</b>	ALLEMAGNE