

FICHE TECHNIQUE

MEDITEST5

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 5, boîte de 100

CODE ARTICLE : 019882

DATE D'EDITION : 25/01/2023 11:30:10



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MEDITEST5

Désignation

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 5, boîte de 100

Application

- Détermination rapide en diagnostic urinaire- Exploitée visuellement- Acide ascorbique, Glucose, pH, Protéines, Sang

Réglementation

Usage Général de Laboratoire

FICHE TECHNIQUE

MEDITEST5

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 5, boîte de 100

CODE ARTICLE : 019882

DATE D'EDITION : 25/01/2023 11:30:10

Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	0
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

Descriptif du produit

Aspect	Solide coloré
Odeur	Inodore
Composition	- Cellulose : 1-10% - Mélange : 0,1-1% - PVC foli : 95-100%
pH	Oui
Glucose	Oui
Protéines	Oui
Sang	Oui
Acide ascorbique	Oui
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparer une montre munie d'une trotteuse. Noter la date et l'heure 2. Ouvrir le tube. Prendre une seule bandelette. Ne pas toucher la zone réactive / zone-test 3. Refermer le tube immédiatement 4. Plonger la bandelette dans l'urine durant 1 seconde environ. La zone réactive doit être immergée 5. Après avoir retiré la bandelette de l'échantillon d'urine, en éponger brièvement la bordure sur du papier. Garder la bandelette en main 6. Attendre 30 secondes 7. Commencer l'interprétation : sur l'étiquette du tube figure une échelle de couleurs pour la zone réactive Attribuer à la zone réactive une valeur de couleur. Si aucune correspondance ne peut être trouvée, choisir la valeur de couleur la plus proche de la zone réactive 8. Noter le résultat et le présenter à votre médecin lors de la prochaine visite 9. Achever l'interprétation au plus tard 1 minute après avoir immergé la bandelette <p>Respecter toujours ce délai. Au-delà de ce délai, l'intensité des couleurs de la zone réactive peut changer</p>
Température de stockage	+4 à +30°C

FICHE TECHNIQUE

MEDITEST5

Bandelette urinaire Medi-Test Combi 5, boîte de 100

CODE ARTICLE : 019882

DATE D'EDITION : 25/01/2023 11:30:10

Conditions de stockage

- Garder l'emballage original hermétiquement fermé
- Protéger les bandelettes de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver le tube au frais (pas au réfrigérateur) et au sec

Manipulation

- Effectuer le test immédiatement après la collecte de l'échantillon d'urine
- Ne sortir du tube que le nombre nécessaire de bandelettes
- Ne toucher pas les zones réactives
- Refermer le tube immédiatement après avoir sorti les bandelettes. Ne retirer pas le dessiccant du bouchon et n'endommager pas ce bouchon

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Oui

Durée de vie (en mois)

24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

MACHEREY NAGEL

Référence du fabricant

93032

Pays d'origine

ALLEMAGNE