

FICHE TECHNIQUE

ANEX

Brosse pour prélèvement cytologique anal Rovers® Anex Brush® verte non sécable stérile unitaire

CODE ARTICLE : 020837

DATE D'EDITION : 11/02/2020 09:00:06



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

ANEX

Désignation

Brosse pour prélèvement cytologique anal Rovers® Anex Brush® verte non sécable stérile unitaire

Application

- Prélèvement cytologique anal sans anoscope ou rectoscope
- Les prélèvements sont effectués sur toute la hauteur du canal anal, la zone transitionano-rectale devant être ciblée

FICHE TECHNIQUE

ANEX

Brosse pour prélèvement cytologique anal Rovers® Anex Brush® verte non sécable stérile unitaire

CODE ARTICLE : 020837

DATE D'EDITION : 11/02/2020 09:00:06

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 100

Minimum de vente (nombre de pièces) 100

Descriptif du produit

Matière du manche	Plastique
Matière de la brosse	Plastique
Partie sécable	Non
Emballage	Sachet unitaire
Niveau de stérilité	Stérile par oxyde d'éthylène
Usage unique	Oui
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> Placez le patient en décubitus dorsal jambes fléchies (pieds au-dessus des hanches ou au même niveau) ou en décubitus latéral gauche (couché sur le côté gauche, jambe droite fléchie) ou en position genupectorale (genoux et coudes sur la table d'examen). Pour assurer un prélèvement correct de la jonction ano-rectale et de la zone de transition anale, insérez l'écouvillon Anex® Brush RT aussi loin que possible, généralement de 5 à 7 cm, jusqu'à sentir une résistance et que l'écouvillon butte sur la paroi distale du rectum. En maintenant une pression latérale ferme sur l'écouvillon, effectuez de larges mouvements rotatoires en retirant progressivement l'écouvillon du canal anal. Ce mouvement génère un effet de spirale de la jonction ano-rectale jusqu'à la marge anale. Insérez l'écouvillon Rovers® Anex® Brush dans le flacon contenant le liquide de conservation, frottez l'écouvillon une dizaine de fois contre les parois du flacon. Pour terminer, secouer l'écouvillon avec vigueur dans le flacon pour bien détacher le matériel prélevé. Refermez le flacon et jetez l'écouvillon Rovers® Anex® Brush.
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas réutiliser - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé - Usage réservé aux professionnels de la santé

FICHE TECHNIQUE

ANEX

Brosse pour prélèvement cytologique anal Rovers® Anex Brush® verte non sécable stérile unitaire

CODE ARTICLE : 020837

DATE D'EDITION : 11/02/2020 09:00:06

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant	ROVERS MEDICAL DEVICES BV
Référence du fabricant	380090331
Pays d'origine	PAYS-BAS