

## FICHE TECHNIQUE

## CERVIB

Brosse endocervicale Cervibrush+™ LBC sécable

CODE ARTICLE : 022244

DATE D'EDITION : 10/06/2021 16:40:03



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

CERVIB

### Désignation

Brosse endocervicale Cervibrush+™ LBC sécable

### Application

- Prélèvement endocervical

### Réglementation

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe I

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1000

## FICHE TECHNIQUE

## CERVIB

Brosse endocervicale Cervibrush+™ LBC sécable

CODE ARTICLE : 022244

DATE D'EDITION : 10/06/2021 16:40:03

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 100

### Descriptif du produit

<b>Matière du manche</b>	Plastique
<b>Matière de la brosse</b>	Plastique
<b>Embout protégé</b>	Non
<b>Partie sécable</b>	Manche sécable
<b>Dimension partie sécable (en mm)</b>	37,00
<b>Longueur totale (en mm)</b>	187,00
<b>Longueur du manche (en mm)</b>	169,00
<b>Diamètre du manche (en mm)</b>	5,00
<b>Longueur de la brosse (en mm)</b>	18,00
<b>Diamètre de la brosse haut (en mm)</b>	7,00
<b>Emballage</b>	Vrac
<b>Niveau de stérilité</b>	Non stérile
<b>Sous-conditionnement</b>	Boite de 100 pièces
<b>Usage unique</b>	Oui
<b>Mode d'emploi</b>	<p>1 – Introduire délicatement la CERVIBRUSH+ LBC dans l'endocol. S'assurer que quelques poils de la brosse restent visibles à l'extérieur du col.</p> <p>2 – Tourner lentement la brosse d'un demi à un tour. Retirer la brosse.</p> <p>3 – PRÉPARATION DU PRÉLÈVEMENT :</p> <p>A/ Méthode conventionnelle : Faire rouler la brosse sur une lame en verre. Fixer immédiatement la lame et la transmettre au laboratoire.</p> <p>B/ Pour la cytologie en milieu liquide: Casser la tête de l'écouvillon et l'insérer dans la fiole d'échantillon cytologique.</p>
<b>Autres caractéristiques</b>	<p>Dispositif composé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'une tige mince plastique en ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) de 16,8 cm de long. Sécable (longueur totale de la partie amovible : 4 cm) .</li> <li>- d'une tête de 2,2 cm de long, fines fibres en nylon fixées sur un fil torsadé en acier inoxydable. Embout non protégé.</li> </ul> <p>Ne jamais réutiliser. Ne pas stériliser soi-même. Usage strictement réservé au personnel médical.</p>

## FICHE TECHNIQUE

## CERVIB

Brosse endocervicale Cervibrush+™ LBC sécable

CODE ARTICLE : 022244

DATE D'EDITION : 10/06/2021 16:40:03

Ne pas utiliser en cas de grossesse suspectée ou confirmée.  
Ne pas utiliser pour des prélèvements au niveau de l'endomètre.  
Ne jamais introduire la brosse trop profondément. Pendant toute la procédure, il faut que les poils de la brosse soient visibles dans la partie inférieure du col de l'utérus.

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	60

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	CELLPATH PLC
<b>Référence du fabricant</b>	NCA-0780-02A
<b>Pays d'origine</b>	ROYAUME UNI