

## FICHE TECHNIQUE

## GARZEBRE

Garrot tourniquet motif zèbre sans latex

CODE ARTICLE : 022725

DATE D'EDITION : 25/02/2022 10:20:04



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

GARZEBRE

**Désignation**

Garrot tourniquet motif zèbre sans latex

**Application**

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

**Réglementation**

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe I

## FICHE TECHNIQUE

## GARZEBRE

Garrot tourniquet motif zèbre sans latex

CODE ARTICLE : 022725

DATE D'EDITION : 25/02/2022 10:20:04

### Conditionnement

Carton (nombre de pièces)	1
Minimum de vente (nombre de pièces)	1

### Descriptif du produit

Matière bande	Tissu
Composition bande	- Polyester - Lycra®
Matière boucle	Plastique
Composition boucle	Polycarbonate
Longueur (en cm)	50,0
Largeur (en cm)	2,5
Epaisseur (en mm)	2,0
Poids (en g)	44,0
Couleur	Motif zèbre
Niveau de stérilité	Non stérile
Latex	Non
Autoclavable	Oui
Nettoyage/Désinfection	<p>Nettoyage :</p> <p>Aucune procédure de nettoyage mécanique ne peut être utilisée. Laver le produit à 60 °C (maximum) avec des lessives douces pour tissus délicats (lavage à la main).</p> <p>Désinfection :</p> <p>Aucune procédure de désinfection mécanique ne peut être utilisée. Nous recommandons la désinfection avec un désinfectant liquide. Mettre le garrot automatique dans un récipient (non métallique), le couvrir entièrement avec la solution et le laisser dans la solution pendant au moins 5 minutes. Après le temps d'action, rincer abondamment à l'eau fraîche (au moins 3 cycles de rinçage de 1 minute au moins), puis laisser sécher.</p> <p>Ne pas utiliser de désinfectants contenant des agents gonflants chlorés ou des hydrocarbures aromatiques</p>
Mode d'emploi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fermer le garrot</li> <li>2. Comprimer</li> <li>3. Détacher lentement</li> <li>4. Appuyer sur le bouton poussoir de la boucle, puis ouvrir</li> </ol>

## FICHE TECHNIQUE

## GARZEBRE

Garrot tourniquet motif zèbre sans latex

CODE ARTICLE : 022725

DATE D'EDITION : 25/02/2022 10:20:04

### Usage unique

5. Enrouler la bande

Non

### Autres caractéristiques

Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages externes et le bon fonctionnement du dispositif. En cas de défauts ou de dysfonctionnements, le produit ne doit plus être utilisé.

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

KIMETEC GmbH

**Référence du fabricant**

500189

**Pays d'origine**

ALLEMAGNE