

## FICHE TECHNIQUE

## PNT62DIST

Pansement non-tissé 6x2cm blanc sans latex en boite distributrice

CODE ARTICLE : 022784

DATE D'EDITION : 22/03/2022 16:30:19



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

PNT62DIST

### Désignation

Pansement non-tissé 6x2cm blanc sans latex en boite distributrice

### Application

- Protection des plaies ou coupures

### Réglementation

Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe I

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)**

16000

## FICHE TECHNIQUE

## PNT62DIST

Pansement non-tissé 6x2cm blanc sans latex en boîte distributrice

CODE ARTICLE : 022784

DATE D'EDITION : 22/03/2022 16:30:19

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 250

### Descriptif du produit

<b>Matière</b>	Non-tissé
<b>Grammage (en g/m<sup>2</sup>)</b>	40 à 50
<b>Niveau de stérilité</b>	Non stérile
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Longueur (en mm)</b>	60
<b>Largeur (en mm)</b>	20
<b>Latex</b>	Non
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Support : non-tissé blanc extensible, 100% polyester</li> <li>- Adhésif : colle médicale acrylique, enduction unie</li> <li>- Compresse : non-tissé : 90% viscose et 10% polypropylène + grille anti-adhérente en polyéthylène</li> <li>- Protecteur : papier siliconé sur 1 face de couleur blanc</li> </ul>
<b>Usage unique</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	<p><b>MODE D'EMPLOI</b>          Pour utiliser un pansement de la boîte distributrice, il suffit de le décoller de sa bande porteuse et protectrice puis de l'appliquer immédiatement sur le point d'injection.</p> <p><b>PRÉCAUTIONS D'EMPLOI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce dispositif est fourni non stérile.</li> <li>- Utiliser le pansement sur une zone cutanée sèche ne présentant aucune infection, aucune nécrose et aucun abcès.</li> <li>- Centrer correctement le dispositif par rapport au point d'injection.</li> <li>- En cas de réapparition de saignement ou d'hématome important, veuillez vous rapprocher de votre médecin.</li> <li>- Ne pas utiliser le pansement chez des patients allergiques et sensibles aux masses adhésives acryliques. Lors de l'utilisation du dispositif chez un nouveau patient, surveiller l'absence de signes d'irritations cutanées. En cas de réactions allergiques cutanées, interrompre l'utilisation.</li> <li>- La formulation de la masse adhésive ne contient pas de caoutchouc naturel (Latex).</li> <li>- Le dispositif est à usage unique. La réutilisation altère les caractéristiques et la performance des dispositifs notamment la perte</li> </ul>

## FICHE TECHNIQUE

## PNT62DIST

Pansement non-tissé 6x2cm blanc sans latex en boite distributrice

CODE ARTICLE : 022784

DATE D'EDITION : 22/03/2022 16:30:19

du pouvoir adhésif. La réutilisation peut entraîner des risques de contamination et d'infections graves pour les patients : ne pas réutiliser.

### CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur des zones cutanées infectées ou présentant des nécroses ou des abcès.

Ne pas utiliser en cas d'allergies avérées aux masses adhésives à base d'acrylates.

### EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables peuvent être des signes d'irritations cutanées, des rougeurs et des réactions allergiques cutanées. En cas de rougeurs ou d'irritation, le dispositif pourra être retiré après information du médecin. En cas de persistance des symptômes d'irritation et d'allergies, stopper l'utilisation du dispositif et demander un avis médical.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre de l'UE dans lequel l'utilisateur est établi.

### STOCKAGE ET CONSERVATION

Conserver à l'abri de la lumière du soleil. Conserver à l'abri de l'humidité.

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	36

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

### Nom du fabricant

LABORATOIRES COLUXIA

## FICHE TECHNIQUE

## PNT62DIST

Pansement non-tissé 6x2cm blanc sans latex en boite distributrice

CODE ARTICLE : 022784

DATE D'EDITION : 22/03/2022 16:30:19

**Référence du fabricant**

56200201316

**Pays d'origine**

FRANCE