

FICHE TECHNIQUE

GARBAB

Garrot tourniquet pour bébé sans latex

CODE ARTICLE : 022844

DATE D'EDITION : 22/04/2022 14:10:03



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

GARBAB

Désignation

Garrot tourniquet pour bébé sans latex

Application

- Compression externe du système circulatoire lors du prélèvement sanguin

Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe I

FICHE TECHNIQUE

GARBAB

Garrot tourniquet pour bébé sans latex

CODE ARTICLE : 022844

DATE D'EDITION : 22/04/2022 14:10:03

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 200

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

| | |
|-------------------------------|---|
| Matière bande | Tissu |
| Composition bande | - Polyester - Lycra® |
| Matière boucle | Plastique |
| Composition boucle | Polycarbonate |
| Longueur (en cm) | 35,5 |
| Largeur (en cm) | 1,3 |
| Epaisseur (en mm) | 2,0 |
| Poids (en g) | 44,0 |
| Couleur | Bleu |
| Niveau de stérilité | Non stérile |
| Latex | Non |
| Nettoyage/Désinfection | <p>Nettoyage :</p> <p>Aucune procédure de nettoyage mécanique ne peut être utilisée. Laver le produit à 60 °C (maximum) avec des lessives douces pour tissus délicats (lavage à la main).</p> <p>Désinfection :</p> <p>Aucune procédure de désinfection mécanique ne peut être utilisée. Nous recommandons la désinfection avec un désinfectant liquide. Mettre le garrot automatique dans un récipient (non métallique), le couvrir entièrement avec la solution et le laisser dans la solution pendant au moins 5 minutes. Après le temps d'action, rincer abondamment à l'eau fraîche (au moins 3 cycles de rinçage de 1 minute au moins), puis laisser sécher. Ne pas utiliser de désinfectants contenant des agents gonflants chlorés ou des hydrocarbures aromatiques</p> |
| Mode d'emploi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fermer le garrot 2. Comprimer 3. Détacher lentement 4. Appuyer sur le bouton poussoir de la boucle, puis ouvrir 5. Enrouler la bande |

FICHE TECHNIQUE

GARBAB

Garrot tourniquet pour bébé sans latex

CODE ARTICLE : 022844

DATE D'EDITION : 22/04/2022 14:10:03

Usage unique

Non

Autres caractéristiques

Avant chaque utilisation, vérifiez l'absence de dommages externes et le bon fonctionnement du dispositif. En cas de défauts ou de dysfonctionnements, le produit ne doit plus être utilisé.

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot

Oui

Présence d'une date de péremption

Non

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

KIMETEC GmbH

Référence du fabricant

560160

Pays d'origine

ALLEMAGNE