

## FICHE TECHNIQUE

## MEDSPRAY750

Détergent désinfectant Stericid MEDSPRAY pour surfaces, spray de 750ml

CODE ARTICLE : 023599

DATE D'EDITION : 11/01/2023 16:10:03



BIOCIDÉ

Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

MEDSPRAY750

### Désignation

Détergent désinfectant Stericid MEDSPRAY pour surfaces, spray de 750ml

### Application

Nettoyage et désinfection :  
- des surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public  
- des surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)

## FICHE TECHNIQUE

## MEDSPRAY750

Détergent désinfectant Stericid MEDSPRAY pour surfaces, spray de 750ml

CODE ARTICLE : 023599

DATE D'EDITION : 11/01/2023 16:10:03

### Réglementation

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 6

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 6

### Descriptif du produit

<b>Capacité (en ml)</b>	750
<b>Type de contenant</b>	Pulvérisateur
<b>Composition</b>	Chlorure de didécyl diméthyl ammonium n° CAS 7173-51-5 : 0,29%
<b>Propriétés microbiologiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bactéricide en 5 minutes (EN 1276, EN 13727, EN 13697)</li><li>- Levuricide en 5 minutes (EN 1650, EN 13624, EN 13697)</li><li>- Virucide en 5 minutes (EN14476) sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, en 5 minutes (EN16777) sur Vaccinia, Adenovirus, Norovirus</li></ul>
<b>Consignes</b>	Produit biocide TP2 - Produit utilisé pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
<b>Conseils d'utilisation</b>	Pulvérisez le produit sur la surface à nettoyer et désinfectez en s'assurant de mouiller complètement la surface. Utilisez un non-tissé ou tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m <sup>2</sup> soit 22 pulvérisations). Laissez agir 5 minutes. Ne pas rincer.

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	24

## FICHE TECHNIQUE

## MEDSPRAY750

Détergent désinfectant Stericid MEDSPRAY pour surfaces, spray de 750ml

CODE ARTICLE : 023599

DATE D'EDITION : 11/01/2023 16:10:03

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant**

STERIDIS

**Référence du fabricant**

MEDSPRAY

**Pays d'origine**

FRANCE