

FICHE TECHNIQUE

MEDFILL5L

Détergent désinfectant Stericid MEDFILL pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 023600

DATE D'EDITION : 23/06/2023 15:20:04



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

MEDFILL5L

Désignation

Détergent désinfectant Stericid MEDFILL pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux, bidon de 5L

Application

Nettoyage et désinfection :
- des surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public

FICHE TECHNIQUE

MEDFILL5L

Détergent désinfectant Stericid MEDFILL pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 023600

DATE D'EDITION : 23/06/2023 15:20:04

Réglementation

- des surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...)

Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 1

Minimum de vente (nombre de pièces) 1

Descriptif du produit

Capacité (en L)	5
Type de contenant	Bidon
Composition	Chlorure de didécylidiméthylammonium n° CAS 7173-51-5 : 0,29%
Propriétés microbiologiques	- Bactéricide en 5 minutes (EN 1276, EN 13727, EN 13697) - Levuricide en 5 minutes (EN 1650, EN 13624, EN 13697) - Virucide en 5 minutes (EN14476) sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, en 5 minutes (EN16777) sur Vaccinia, Adenovirus, Norovirus
Consignes	Produit biocide TP2 - Produit utilisé pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.
Conseils d'utilisation	Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer et désinfectez en s'assurant de mouiller complètement la surface. Utilisez un non-tissé ou tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface (22g/m ² soit 22 pulvérisations). Laissez agir 5 minutes. Ne pas rincer.

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui

FICHE TECHNIQUE

MEDFILL5L

Détergent désinfectant Stericid MEDFILL pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux, bidon de 5L

CODE ARTICLE : 023600

DATE D'EDITION : 23/06/2023 15:20:04

Durée de vie (en mois)

24

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

Nom du fabricant

STERIDIS

Référence du fabricant

MEDFILL

Pays d'origine

FRANCE