

## FICHE TECHNIQUE

**CNS**

Cellule de Nageotte simple avec marquage CE

CODE ARTICLE : 216010

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:48:50



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

CNS

**Désignation**

Cellule de Nageotte simple avec marquage CE

**Application**

- Cytologie urinaire et numération des cellules du liquide céphalo-rachidien

**Réglementation**

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Classe A

## FICHE TECHNIQUE

**CNS**

Cellule de Nageotte simple avec marquage CE

CODE ARTICLE : 216010

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:48:50

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	1
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1

### Descriptif du produit

<b>Matière</b>	Verre
<b>Dimensions de la cellule (en mm)</b>	26x32
<b>Analyse</b>	Quantitative
<b>Type de cellule</b>	Nageotte
<b>Nombre de grilles</b>	1
<b>Dimensions de la grille (en mm)</b>	10x10
<b>Profondeur de la grille (en mm)</b>	0,5 +/-0,003
<b>Volume d'une grille (en µl)</b>	50,0
<b>Surface du plus petit carré (en mm²)</b>	2,5000
<b>Nombre de lamelles planées livrées</b>	2
<b>Dimensions des lamelles planées (en mm)</b>	30x30
<b>Usage unique</b>	Non
<b>Mode d'emploi</b>	<p>Homogénéiser soigneusement l'urine par agitation ou insufflation. Les meilleurs résultats s'obtiennent sans coloration. Si on veut colorer, utiliser le Fuschine acide diluée à 20% dans l'alcool (2 à 3 gouttes pour 2mL d'urine).</p> <p>Le colorant laisse intacts les leucocytes, a peu d'effet sur les hématies et colore en rose les cellules épithéliales.</p> <p>Poser une grosse goutte sur le quadrillage, recouvrir de la lamelle et laisser déposer 5 à 10 minutes sans aucune centrifugation.</p> <p>L'observation est excellente car les éléments fragiles comme les cylindres restent intacts. Les éléments chimiques apparaissent très nettement. Au premier coup d'œil, on juge s'il existe ou non du pus à hématurie et on voit immédiatement si la pyurie est massive ou modérée. Dans les cas importants, il est aisé de compter les leucocytes (ou même les hématies).</p> <p>Par des examens successifs, on peut suivre l'évolution d'une pyurie ou d'une hématurie en diluant l'urine dans du sérum physiologique s'il en est besoin. Les résultats se raccordent très exactement à ceux obtenus par la technique HAMBURGER dans laquelle on opère sur 1</p>

## FICHE TECHNIQUE

**CNS**

Cellule de Nageotte simple avec marquage CE

CODE ARTICLE : 216010

DATE D'EDITION : 25/05/2022 09:48:50

### Autres caractéristiques

mm3 d'urine concentrée à 1/10.  
Avec la cellule Nageotte, on compte 8 bandes (10 mm3). Les éléments 10 fois plus dispersés se lisent et se comptent mieux.

- Quadrillage composé de 40 rectangles de 10x0,25mm
- Milieu marqué par une ligne double

## Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Non

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	HECHT ALLEMAGNE
<b>Référence du fabricant</b>	40446701
<b>Pays d'origine</b>	ALLEMAGNE