

## FICHE TECHNIQUE

**SDPP**

Pipette et tube sans citrate pour vitesse de sédimentation Sediplast®

CODE ARTICLE : 945400

DATE D'EDITION : 06/07/2022 10:00:10



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

**Référence**

SDPP

**Désignation**

Pipette et tube sans citrate pour vitesse de sédimentation  
Sediplast®

**Application**

- Détermination de la vitesse de sédimentation selon la méthode  
Westergren

**Réglementation**

Règlement 2017-746 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro -  
Classe A

## FICHE TECHNIQUE

## SDPP

Pipette et tube sans citrate pour vitesse de sédimentation Sediplast®

CODE ARTICLE : 945400

DATE D'EDITION : 06/07/2022 10:00:10

### Conditionnement

<b>Carton (nombre de pièces)</b>	1000
<b>Minimum de vente (nombre de pièces)</b>	1000

### Descriptif du produit

<b>Tube</b>	Sans citrate
<b>Bouchon</b>	Sans
<b>Matière</b>	- Tube : polyéthylène - Pipette : polystyrène
<b>Dimensions (en mm)</b>	- Longueur pipette : $207 \pm 1$ - Diamètre intérieur pipette : $2,5 \pm 0,15$ - Hauteur tube : $49,5 \pm 0,5$ - Diamètre extérieur tube : $8,6 \pm 0,5$ et $12,5 \pm 0,5$
<b>Capacité du tube (en ml)</b>	1
<b>Graduations de la pipette (en mm)</b>	De 0 à 150
<b>Remplissage de la pipette</b>	Mise à jour automatique grâce au bouchon "trop plein" de l'extrémité de la pipette
<b>Etiquette</b>	Sans
<b>Niveau de stérilité</b>	Non stérile
<b>Usage unique</b>	Oui
<b>Présence de latex</b>	Non
<b>Radioactif</b>	Non
<b>Mode opératoire</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Remplir le microtube de 1 ml de sang jusqu'au cran de graduation</li> <li>Introduire la pipette dans le tube à essai jusqu'à ce qu'elle touche complètement le fond du tube. Le zéro se fait automatiquement</li> <li>Introduire l'ensemble (pipette et tube) dans le portoir. Maintenir le tout sur une surface plane et horizontale, sans vibrations tout au long de l'analyse. Après 1 heure puis 2 heures exactement, relever les résultats de la vitesse de sédimentation (ligne de séparation entre la phase séreuse et la phase corpusculaire). La lecture se fait directement en unités Westergren</li> <li>Jeter l'ensemble après utilisation dans un récipient à déchets d'activité de soins à risques infectieux</li> </ol>

## FICHE TECHNIQUE

## SDPP

Pipette et tube sans citrate pour vitesse de sédimentation Sediplast®

CODE ARTICLE : 945400

DATE D'EDITION : 06/07/2022 10:00:10

### Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	120

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant</b>	LP ITALIANA
<b>Référence du fabricant</b>	244570
<b>Pays d'origine</b>	ITALIE