

Rovers® Anex® Brush

FR

Rovers® Anex® Brush pour prélèvement de cellules anales, stérilisé, à usage unique.
 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Permet d'effectuer un prélèvement cytologique anal sans anoscope ou rectoscope.
 Les prélèvements sont effectués sur toute la hauteur du canal anal, la zone de transition ano-rectale devant être ciblée.

Mode d'emploi :

1. Placez le patient en décubitus dorsal jambes fléchies (pieds au-dessus des hanches ou au même niveau) ou en décubitus latéral gauche (couché sur le côté gauche, jambe droite fléchie) ou en position genupectorale (genoux et coudes sur la table d'examen).
2. Pour assurer un prélèvement correct de la jonction ano-rectale et de la zone de transition anale, insérez l'écouvillon Rovers® Anex® Brush aussi loin que possible, généralement de 5 à 7 cm, jusqu'à sentir une résistance et que l'écouvillon butte sur la paroi distale du rectum.
3. En maintenant une pression latérale ferme sur l'écouvillon, effectuez de larges mouvements rotatoires en retirant progressivement l'écouvillon du canal anal. Ce mouvement génère un effet de spirale de la jonction ano-rectale jusqu'à la marge anale.
4. Insérez l'écouvillon Rovers® Anex® Brush dans le flacon contenant le liquide de conservation, frottez l'écouvillon une dizaine de fois contre les parois du flacon. Pour terminer, secouer l'écouvillon avec vigueur dans le flacon pour bien détacher le matériel prélevé.
5. Refermez le flacon et jetez l'écouvillon Rovers® Anex® Brush.

À USAGE UNIQUE (NE PAS REUTILISER)

Une réutilisation provoquerait une contamination et un faux diagnostic.

Usage réservé aux professionnels de la santé.

Fabriqué par :

Rovers Medical Devices B.V., 5347 KV Oss, Pays-Bas

® Marque déposée

® Modèle breveté

