

**COMMERCIAL CENTER&R-D Center**

#1002, Building 3, 89 Shengli Rd, Jiangning District, Nanjing 211106, China  
Tel.: 0086 25 86216803  
Fax: 0086 25 86214463  
E-mail: info@citotest.com

**PRODUCTION**

NO.339, Beihai West Road, Haimen, City 226100, Jiangsu Province, China.  
Tel.: 0086 513 82259348  
Fax: 0086 513 82110195  
E-mail: info@citotest.com.cn

**CITOTEST<sup>®</sup>** Scientific

CITOTEST SCIENTIFIC CO.,LTD

[www.citotest.com](http://www.citotest.com)

## Instruction d'utilisation / Cassettes pour histologie

### 1. Spécifications

Les spécifications s'appliquent aux cassettes pour histologie CITOTEST, incluant les cassettes pour biopsies, les cassettes pour tissus et les cassettes compatibles impression laser.

### 2. Instructions et applications

Applicable au traitement des biopsies/tissus et l'enrobage en histopathologie.

### 3. Application Direction

- Avant utilisation, sélectionner la cassette appropriée selon la taille des perforations de celle-ci et la taille de l'échantillon afin d'éviter toute perte d'échantillon.
- Pour l'impression par automate, choisir la forme de cassette appropriée ; chaque imprimante correspondant à un modèle de cassette différent.
- La plage d'identification peut être utilisée avec un crayon, un marqueur ou une imprimante.

### 4. Notes techniques et Precautions

- Les cassettes pour traitement des petites biopsies ne doivent pas être utilisées pour l'enrobage.
- Les cassettes en POM, sont résistantes aux réactifs courants, mais ne sont pas résistantes aux acides forts, tels que l'acide sulfurique et l'acide nitrique ni aux réactifs très oxydants.
- Ne pas toucher la plage d'identification immédiatement après traitement (avant déshydratation) car le marquage risque de s'effacer.

### 5. Stockage

- Stocker dans un endroit frais, à l'abri des hautes températures et de la lumière directe du soleil, afin d'éviter tout risque de vieillissement prématuré des cassettes.

### 6. Assurance Qualité

«CITOTEST processing/embedding cassettes Quality Standards»