



Installation du SafeClip Rail médical

Convient pour des rails de 25, 30, 35 & 40mm

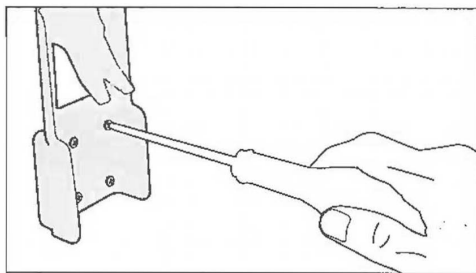


Préparation du SafeClip

Placer les 4 vis sur les orifices pré-perçés aux 4 angles.

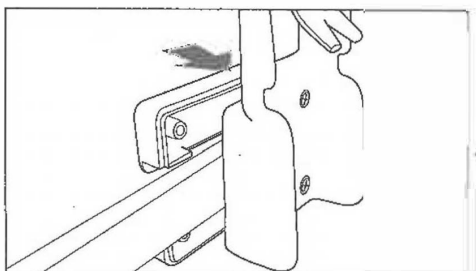

Fixer sur le rail

Tenir les deux adaptateurs et rapporter le SafeClip - Vérifier que l'adaptateur choisi correspond à la dimension du rail.

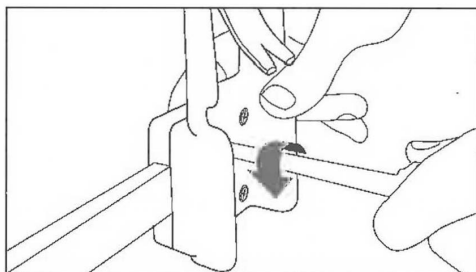

Visser

N'utiliser que les vis fournies avec l'adaptateur.

25mm + 30mm
25mm bar


30mm + 35mm
30mm bar

30mm + 35mm
35mm bar

Choisir la bonne combinaison d'adaptateurs.


Installation du SafeClip Diamond, Rond, Carré

Convient pour des barre rondes, rectangulaires ou triangulaires de 20 à 35 mm

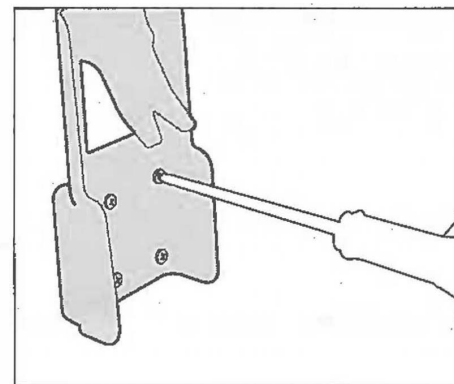


Préparation du SafeClip

Placer les 4 vis sur les orifices pré-perçés aux 4 angles.

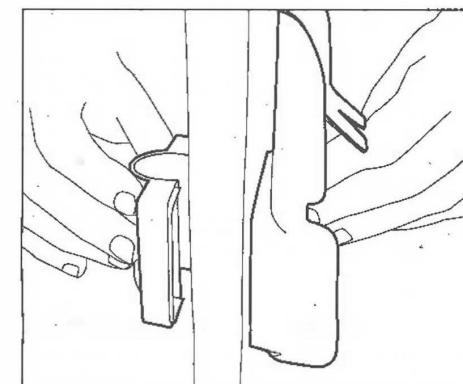

Fixer sur la barre

Tenir l'adaptateur et rapporter le SafeClip.

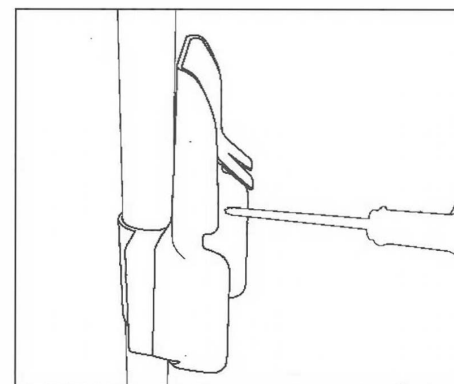


Visser

N'utiliser que les vis fournies avec l'adaptateur.

Besoin d'un complément d'information ?
info@hospidex.com




Montage des SafeClip an Schienen

Passend für Schienengrößen von 25, 30, 35 & 40mm

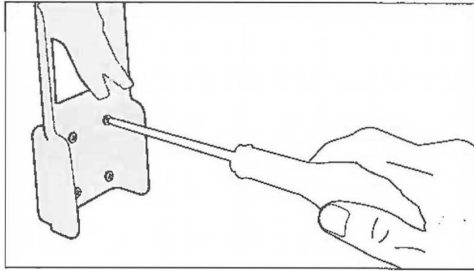


Vorbereitung des SafeClip

Stecken Sie die vier Schrauben in die vorgesehenen Einbuchtungen an allen vier Ecken

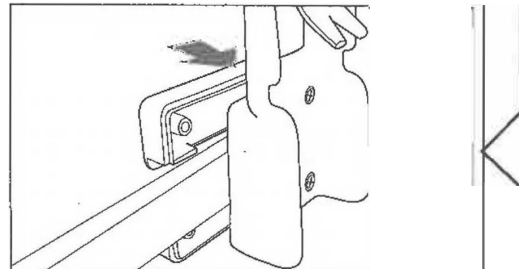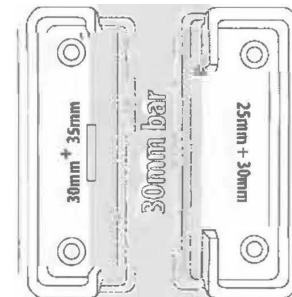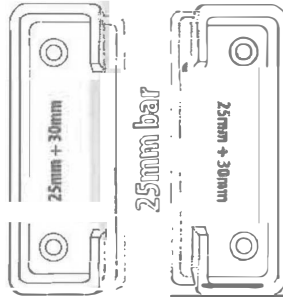

Befestigung auf der Schiene

Fügen Sie die beiden Adapter mit dem SafeClip zusammen und überprüfen Sie die Passform auf der Schiene

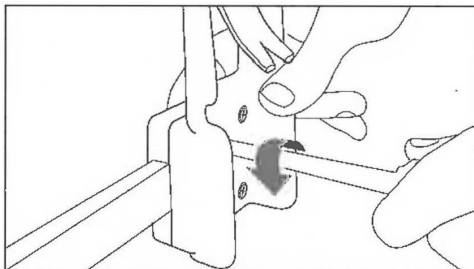


Festschrauben

Benutzen Sie nur die mitgelieferten Schrauben

Wählen Sie die passende Adapterkombination


Montage des SafeClip Diamond, rund, eckig

Passend für runde, rechteckige und dreieckige Stangen von 25 bis 35 mm

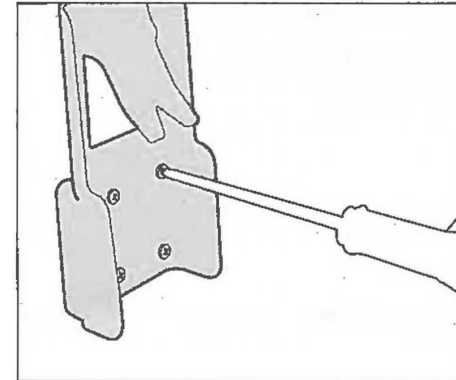


Vorbereitung des SafeClip

Stecken Sie die vier Schrauben in die vorgesehenen Einbuchtungen an allen vier Ecken

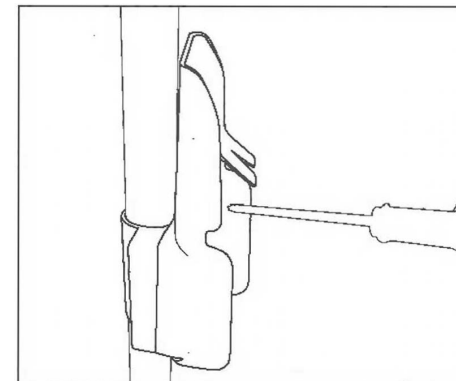

Schrauben

Benutzen Sie nur die mitgelieferten Schrauben

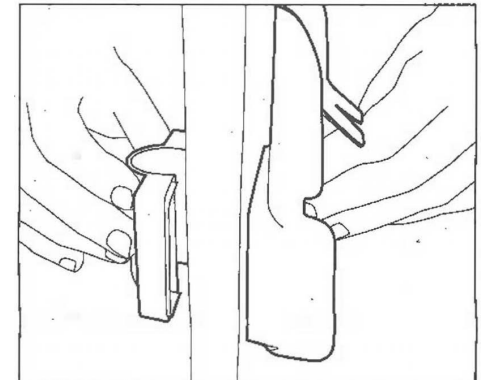

Befestigung an der Stange

Halten Sie den Adapter gegen die Stange und fügen Sie den SafeClip dazu