



# PLASTIGROUP


## Détermination de groupe sanguin

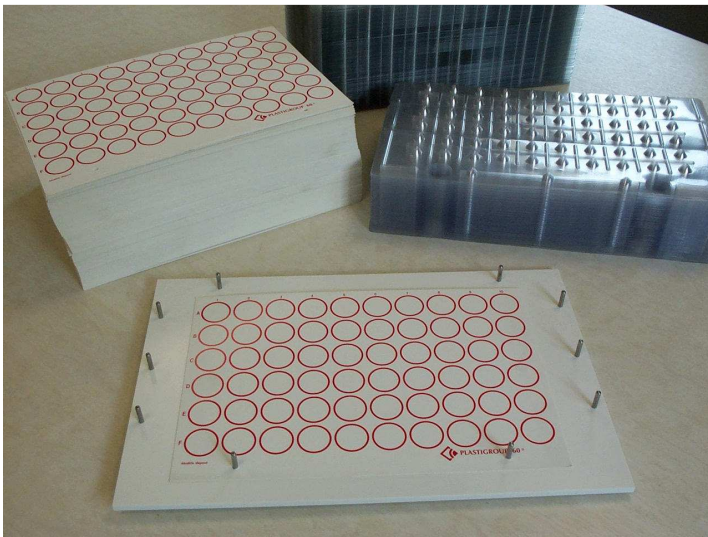

Vue d'ensemble socle plaque d'analyse et mélangeur

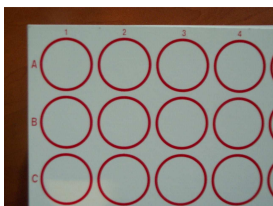

Repère pour une lecture plus aisée.

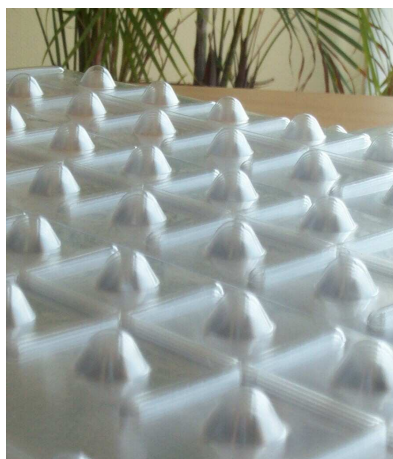

Mélangeur



Mélangeur sécables -  
Plaques



Mélangeur sécable .

## LA FONCTION DU PLASTIGROUP

**PLASTIGROUP** est un produit consommable permettant d'établir la détermination de groupe sanguin

## PLASTIGROUP EN PRATIQUE

- Gain de temps
- Lecture aisée et excellente grâce aux repères alphanumériques.
- Pas de dégagement de chlore lors de la destruction par incinération.
- Mélangeur sécable ou non-sécable

## PLASTIGROUP ET SON UTILISATION

Positionnez la plaque d'examen sur chacun des disques prévus à cet effet, une goutte de sang et une goutte de réactif.

Grâce au mélangeur thermofonné, et éventuellement sécable, vous obtenez un mélange homogène et simultané sur l'ensemble des disques.

## CONDITIONNEMENT

- Conditionné en carton de 200 mélangeurs et de 200 plaques d'analyse.
- Lors de la première commande, il sera nécessaire de prévoir l'investissement d'un socle de travail.

## ENCOMBREMENT

Socle de travail : 310 x 215

Plaques d'analyse : 330 x 215

Plaques mélangeuses : 330 x 215

## USAGE UNIQUE